

Gebruiksaanwijzing

miniRITE miniRITE T

Oticon Opn™
Oticon Opn S™
Oticon Opn Play™
Oticon Siya



Made for
iPhone | iPad | iPod

oticon
PEOPLE FIRST

Modellenoverzicht

Dit boekje is van toepassing op de volgende hoortoestelmodellen uit de Oticon Opn™, Oticon Opn S™, Oticon Opn Play™ en Oticon Siya families:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Oticon Opn 1 miniRITE | <input type="checkbox"/> Oticon Opn 1 miniRITE T |
| <input type="checkbox"/> Oticon Opn 2 miniRITE | <input type="checkbox"/> Oticon Opn 2 miniRITE T |
| <input type="checkbox"/> Oticon Opn 3 miniRITE | <input type="checkbox"/> Oticon Opn 3 miniRITE T |
| <input type="checkbox"/> Oticon Opn S 1 miniRITE | <input type="checkbox"/> Oticon Opn S 1 miniRITE T |
| <input type="checkbox"/> Oticon Opn S 2 miniRITE | <input type="checkbox"/> Oticon Opn S 2 miniRITE T |
| <input type="checkbox"/> Oticon Opn S 3 miniRITE | <input type="checkbox"/> Oticon Opn S 3 miniRITE T |
| <input type="checkbox"/> Oticon Opn Play 1 miniRITE | <input type="checkbox"/> Oticon Opn Play 1 miniRITE T |
| <input type="checkbox"/> Oticon Opn Play 2 miniRITE | <input type="checkbox"/> Oticon Opn Play 2 miniRITE T |
| <input type="checkbox"/> Oticon Siya 1 miniRITE | <input type="checkbox"/> Oticon Siya 1 miniRITE T |
| <input type="checkbox"/> Oticon Siya 2 miniRITE | <input type="checkbox"/> Oticon Siya 2 miniRITE T |

- LED-lampje (Oticon Opn Play) voor visuele indicatie

Het LED-lampje is ontworpen om gebruikers, zorgverleners, ouders en leerkrachten te helpen het hoortoestel te bedienen en om indicaties te geven voor relevante functies en standen (zie de relevante informatie in het boekje).

De volgende luidsprekers zijn beschikbaar voor de bovenstaande modellen:

- Luidspreker 60
- Luidspreker 85
- Luidspreker 100 (Power toestel)
- Power FlexMoulds luidspreker 100 (Power toestel)
- Power FlexMoulds luidspreker 105 (Power toestel)

Inleiding

In dit boekje vindt u informatie over het gebruik en het onderhoud van uw nieuwe hoortoestel. Lees dit boekje aandachtig door en vergeet daarbij het hoofdstuk **Waarschuwingen** niet. Lees dit boekje aandacht door, inclusief het hoofdstuk Waarschuwingen.

Uw gehoorspecialist heeft het hoortoestel zodanig ingesteld dat het aan uw behoeften voldoet. Uw hoorzorg professional heeft het hoortoestel zodanig ingesteld dat het aan uw behoeften voldoet.

| **Over** | Aan de slag | Gebruik | Opties | Tinnitus | Waarschuwingen | Aanvullende informatie |

Dit boekje is voorzien van een navigatiebalk, zodat u gemakkelijk door de verschillende hoofdstukken kunt navigeren.

Beoogd gebruik

De hoortoestellen zijn bedoeld voor het versterken en overbrengen van geluid naar het oor en compenseren daarmee slechthorendheid voor een licht tot ernstig/zwaar gehoorverlies. Dit hoortoestel is bedoeld voor volwassenen en kinderen ouder dan 36 maanden.

BELANGRIJKE OPMERKING

Tijdens de aanpassing door uw hoorzorg professional is de hoortoestel versterking uniek aangepast en geoptimaliseerd voor uw persoonlijke gehoor.

Inhoudsopgave

Over

Uw hoortoestel, luidspreker en oorstukje	10
miniRITE	12
miniRITE T	13
Nagaan wat het linker- en rechertoestel is	14
MultiTool voor het hanteren van batterijen en schoonmaken	15

Aan de slag

Het hoortoestel AAN- en UITzetten	16
Wanneer de batterij vervangen	17
De batterij vervangen (type 312)	18
Het hoortoestel indoen	20

Gebruik


Onderhoud van uw toestel	21
Standaard oorstukjes vervangen	22
ProWax miniFit filter vervangen	25

Inhoudsopgave


Aangepaste oorstukjes schoonmaken	26
ProWax filter vervangen	27
Vliegtuigmodus	28
Opties	
Optionele functies en accessoires	29
Het volume aanpassen miniRITE	30
Het volume aanpassen miniRITE T	31
Programma veranderen	32
Dempen	34
Hoortoestellen gebruiken met iPhone en iPad	35
Koppelen met iPhone	36
Draadloze accessoires en andere opties	38
Geluids- en LEDindicaties	40

Tinnitus	
Tinnitus SoundSupport™ (optioneel)	44
Richtlijnen voor gebruikers van tinnitusgeluidsgenerators	45
Geluid- en volumeregeling	46
Beperking gebruiksduur	50
Tinnitus SoundSupport waarschuwingen	53
Waarschuwingen	
Algemene waarschuwingen	54
Aanvullende informatie	
Problemen oplossen	58
Water- en stofbestendig (IP68)	60
Gebruiksomstandigheden	61
Garantie	62
Technische informatie	64
Uw individuele hoortoestelinstellingen	70

Uw hoortoestel, luidspreker en oorstukje

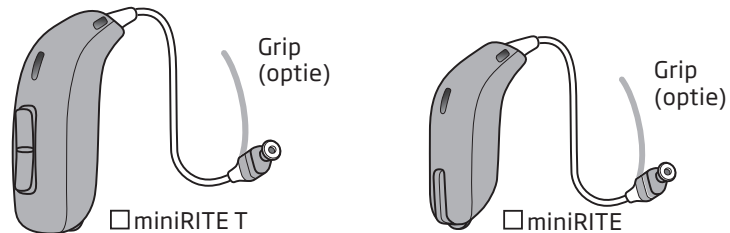



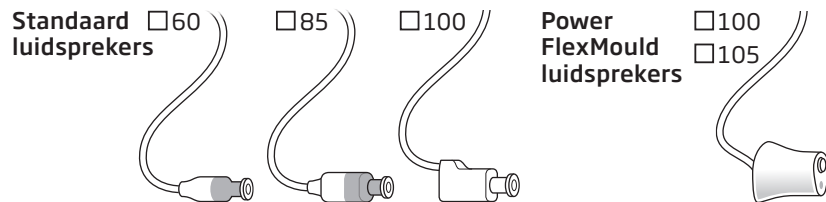


De hoortoestellen maken gebruik van een van de volgende luidsprekers:



De standaard luidsprekers maken gebruik van een van de volgende oorstukjes:


Standaardoorstukjes:

-  Open dome
-  Bass dome, enkele venting
-  Bass dome, dubbele venting
-  Power dome
-  GripTip
Verkrijgbaar in small en large, links en rechts, met en zonder venting.

Custom oorstukjes:

-  MicroMould
-  LiteTip
-  VarioTherm® MicroMould
-  VarioTherm® LiteTip
® VarioTherm is een geregistreerd handelsmerk van Dreve


Dome maten

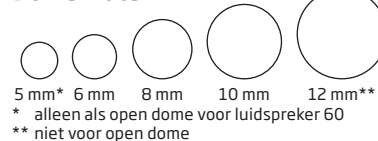

Ga voor meer details over het vervangen van de dome naar het hoofdstuk "De dome of GripTip vervangen"


miniRITE

Wat is het en wat doet het

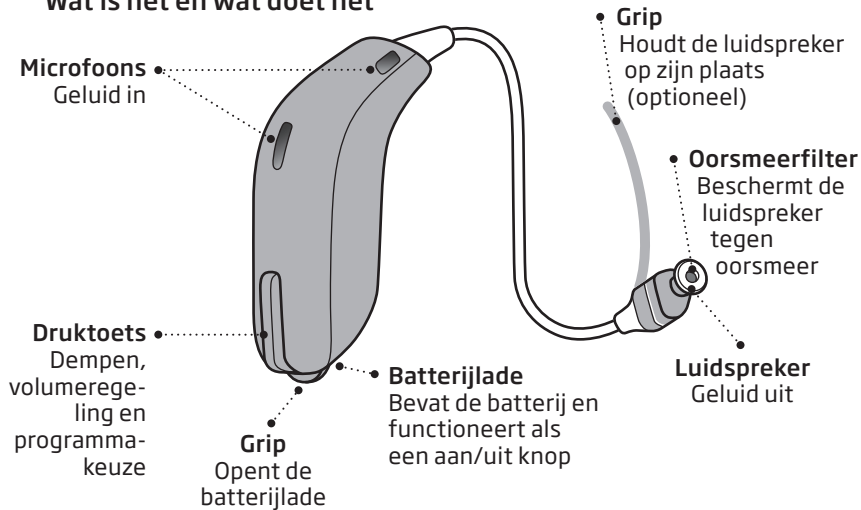

miniRITE T


Wat is het en wat doet het

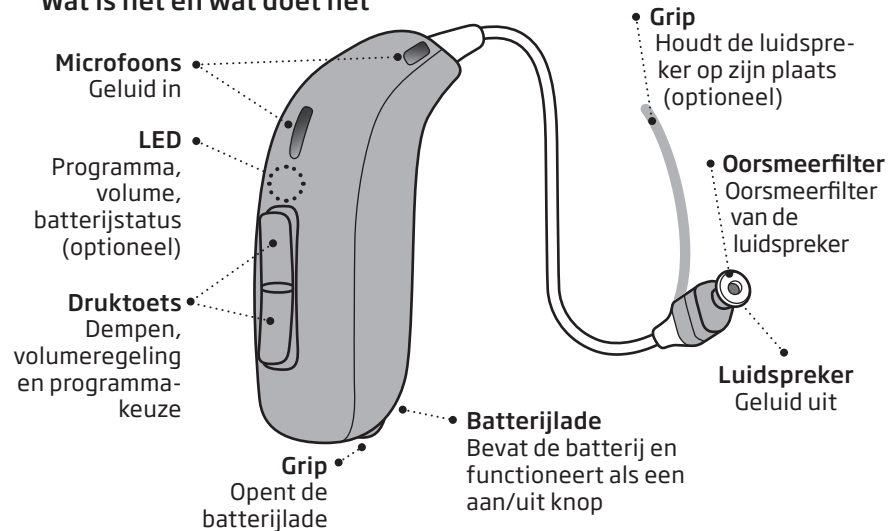

Nagaan wat het linker- en rechertoestel is


Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen het linker- en rechertoestel omdat ze mogelijk verschillend geprogrammeerd zijn.

Er bevinden zich links/rechts kleurmarkeringen op de batterijlade en op de 60- en 85-luidsprekers zoals aangegeven. Markeringen (L of R) kunnen ook worden gevonden op de 100-luidsprekers en op sommige oorstukjes.

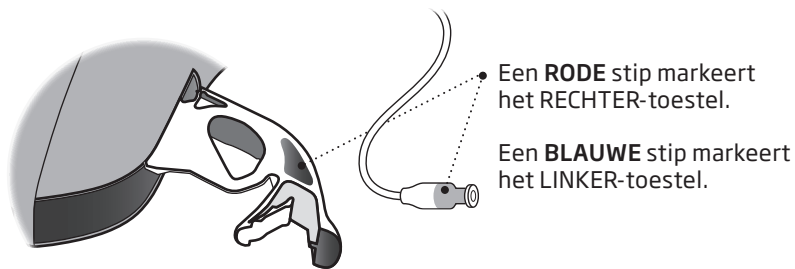

MultiTool voor het hanteren van batterijen en schoonmaken

De MultiTool is voorzien van een magneet waardoor het gemakkelijker is om de batterij van het hoortoestel te vervangen. Deze is ook voorzien van een borstel en een draadlus voor het schoonmaken en om oorsmeer te verwijderen. Als u een nieuwe MultiTool nodig heeft, neem dan contact op met uw hoorzorg professional.

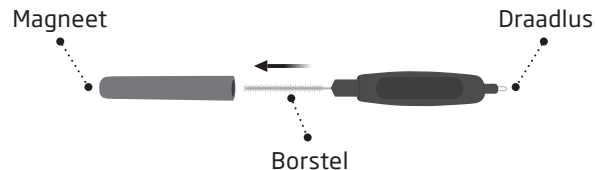

BELANGRIJKE OPMERKING


De meegeleverde MultiTool heeft een ingebouwde magneet. Houd de MultiTool ten minste 30 cm verwijderd van creditcards en andere magnetisch gevoelige voorwerpen.

Het hoortoestel AAN- en UITzetten

De batterijlade wordt gebruikt voor het aan- en uitzetten van het hoortoestel. Om de batterij te sparen, raden we aan het hoortoestel uit te zetten wanneer u het niet draagt. U kunt de standaardinstellingen van uw hoortoestel herstellen door de batterijlade te openen en te sluiten.


AANZETTEN

Doe de batterijlade (met batterij) dicht.

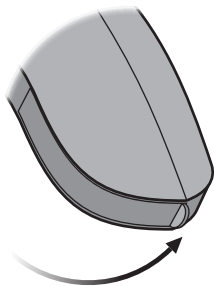

UITZETTEN

Open de batterijlade.

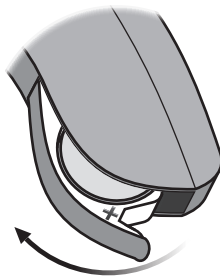

Wanneer de batterij vervangen

Als het tijd is om de batterij te verwisselen, hoort u drie pieptonen die met regelmatige tussenpozen herhaald worden totdat de batterij leeg is.

 **Drie piepjes***
= de batterij is bijna leeg

 **Vier dalende tonen**
= de batterij is leeg

Batterijtip

Om ervoor te zorgen dat het hoortoestel altijd werkt, adviseren we reservebatterijen bij u te dragen of de batterij te vervangen voordat u van huis vertrekt.


Optionele LED

Rood knipperend, voortdurend herhaald, om batterij bijna leeg aan te geven.

* Bluetooth® wordt uitgeschakeld en het is niet mogelijk om draadloze accessoires te gebruiken. Opmerking: De batterijen moeten vaker worden vervangen als u naar uw hoortoestel streamt.


De batterij vervangen (type 312)

1. Oude batterij verwijderen

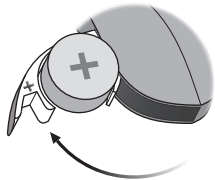

Open de batterijlade volledig. Verwijder de oude batterij.


2. Sticker verwijderen

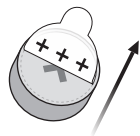

Haal de sticker van de +-zijde van de nieuwe batterij.


Tip:
Wacht 2 minuten zodat de batterij kan ventileren om optimale werking te garanderen.

3. Nieuwe batterij plaatsen

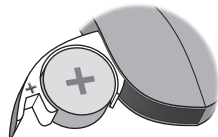

Plaats de nieuwe batterij in de batterijlade. Zorg ervoor dat de +-zijde omhoog gericht is.


4. Sluiten

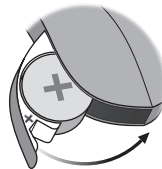

Sluit de batterijlade. Het hoortoestel speelt via het oorstukje een melodietje af.

Houd het oorstukje dichtbij uw oor om het melodietje te kunnen horen.

Tip

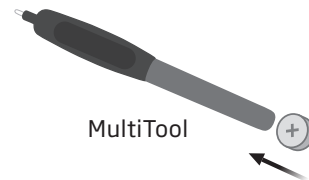

De MultiTool kan worden gebruikt om de batterij te vervangen. Gebruik het magnetische uiteinde voor het uitnemen en plaatsen van batterijen.

De MultiTool is verkrijgbaar bij uw hoorzorg professional.

Het hoortoestel plaatsen


Stap 1



Plaats het hoortoestel achter uw oor.


De luidspreker moet altijd in combinatie met een oorstukje worden gebruikt. Gebruik alleen onderdelen die specifiek bestemd zijn voor uw hoortoestel.

Stap 2

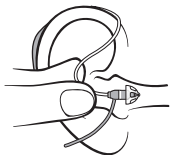

Houd de bocht van het luidsprekersnoer tussen uw duim en wijsvinger. Het oorstukje moet richting de opening van de gehoorgang wijzen.

Stap 3

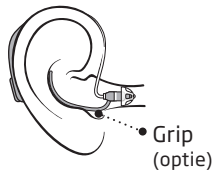

Druk het oorstukje voorzichtig in de gehoorgang tot het luidsprekersnoer dicht tegen uw hoofd zit.


Als de luidspreker een grip heeft, plaats deze dan in het oor zodat het de ronding van het oor volgt.

Uw hoortoestellen onderhouden

Houd uw hoortoestel tijdens het schoonmaken boven een zachte ondergrond, zodat het niet beschadigd raakt als u het laat vallen.

De microfoonopeningen schoonmaken

Borstel voorzichtig het vuil weg uit de openingen. Borstel voorzichtig het oppervlak schoon. Zorg ervoor dat de borstel schoon is en dat hij niet in de openingen wordt geduwd.

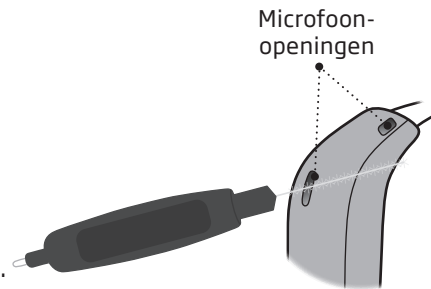


BELANGRIJKE OPMERKING

Gebruik een zachte, droge doek voor het schoonmaken van het hoortoestel. Het hoortoestel mag nooit ondergedompeld worden in water of andere vloeistoffen.

Standaard oorstukjes vervangen


Het standaard oorstukje (dome of Grip Tip) mag niet gereinigd worden. Wanneer het vol zit met oorsmeer moet deze worden vervangen door een nieuwe. Wij raden aan de GripTip tenminste een keer per maand te vervangen.

Stap 1

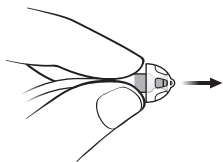


Houd de luidspreker vast en trek het oorstukje eraf.

Stap 2

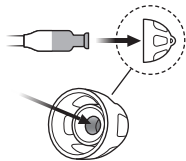

Plaats de luidspreker precies in het midden van het oorstukje voor een stevige bevestiging.

Stap 3

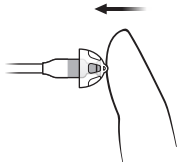

Druk hem goed aan om ervoor te zorgen dat het oorstukje stevig vast zit.


BELANGRIJKE OPMERKING

Als het oorstukje niet op de luidspreker zit wanneer deze uit het oor wordt verwijderd, kan het zijn dat het oorstukje in de gehoorgang is achtergebleven. Raadpleeg dan uw hoorzorg professional voor nadere instructies.

ProWax miniFit-filter

Aan het uiteinde van de luidspreker zit een wit oorsmeerfilter waar het oorstukje is bevestigd. De oorsmeerfilter voorkomt dat oorsmeer en vuil de luidspreker beschadigen. Vervang de filter als die verstopt is of als het hoortoestel niet normaal klinkt, of neem contact op met uw hoorzorg professional.

Verwijder het oorstukje van de luidspreker voordat u de oorsmeerfilter vervangt.

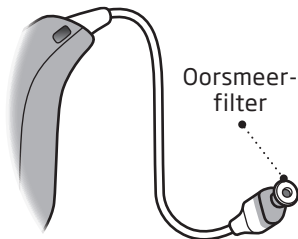


BELANGRIJKE OPMERKING

Gebruik altijd hetzelfde type oorsmeerfilter als degene die origineel bij het toestel wordt geleverd. Als u twijfelt over het gebruiken of vervangen van uw oorsmeerfilter, neem dan contact op met uw hoorzorg professional.

ProWax miniFit filter vervangen

1. Tool

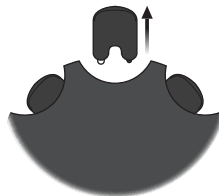


Verwijder de tool uit de behuizing. De tool heeft twee pinnetjes, één lege voor het verwijderen van de filter en één met de nieuwe oorsmeerfilter.

2. Oude filter verwijderen



Duw het lege pinnetje in het oorsmeerfilter in de luidspreker van het toestel en trek het eruit.

3. Nieuwe filter plaatsen

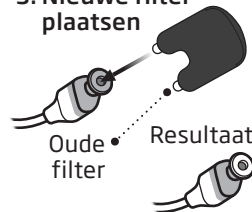

Plaats de nieuwe oorsmeerfilter met behulp van het andere pinnetje, verwijder de tool en werp deze weg.

Opmerking:

Als u een oorstukje of LiteTip gebruikt, dient uw hoorzorg professional de oorsmeerfilter in de luidspreker te vervangen.


Aangepaste oorstukjes schoonmaken

MicroMould/LiteTip

Het oorstukje dient regelmatig te worden schoongemaakt.

Het oorstukje heeft een wit oorsmeerfilter*. De filter voorkomt dat oorsmeer en vuil de luidspreker beschadigen.


Vervang de filter als het verstopt is of als het hoortoestel niet normaal klinkt. Neem anders contact op met uw hoorzorg professional.

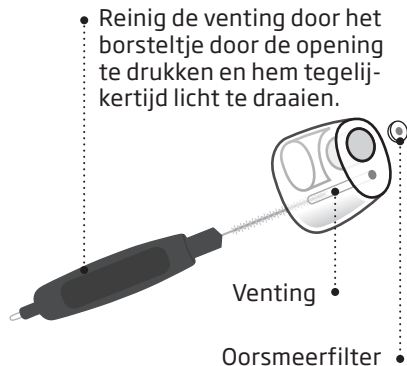

* VarioTherm MicroMould en LiteTip (ThinMould) hebben geen oorsmeerfilter


ProWax filter vervangen

1. Tool

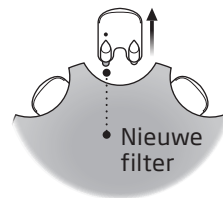


Verwijder de tool uit de behuizing. De tool heeft twee pinnetjes, een lege voor het verwijderen van de filter en een met de nieuwe oorsmeerfilter.

2. Oude filter verwijderen

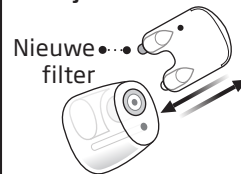

Duw het lege pinnetje in de oorsmeerfilter in het oorstukje en trek het eruit.

3. Nieuwe filter plaatsen

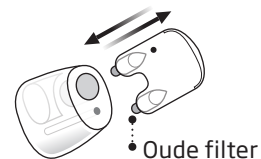


Plaats de nieuwe oorsmeerfilter met behulp van het andere pinnetje, verwijder de tool en werp deze weg.

Vliegtuigmodus

Wanneer de vliegtuigmodus is geactiveerd, staat Bluetooth® uit. Het hoortoestel blijft gewoon werken. Als u op de druktoets op één hoortoestel drukt, wordt de vliegtuigmodus in beide hoortoestellen geactiveerd.


miniRITE

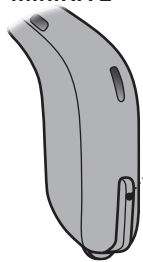

- **In- en uitschakelen** Houd de druktoets minstens 7 seconden ingedrukt. Een melodietje bevestigt uw handeling.

De vliegtuigmodus kan ook worden uitgeschakeld door de batterijlade te openen en sluiten.

miniRITE T

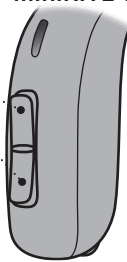

Druk op een van beide uiteinden van de toets

Optionele functies en accessoires

De functies en accessoires die op de volgende pagina's worden beschreven, zijn optioneel. Neem contact op met uw hoorzorg professional om erachter te komen hoe uw hoortoestel is geprogrammeerd.

Als u te maken heeft met moeilijke luistersituaties kan een speciaal programma nuttig zijn. Deze worden door uw hoorzorg professional geprogrammeerd.

Noteer luistersituaties waarbij u hulp nodig heeft.

Het volume aanpassen - miniRITE

Met behulp van de druktoets kunt u het volume aanpassen.
U hoort een klik als u het volume verhoogt of verlaagt.



Het volume aanpassen - miniRITE T

Met behulp van de druktoets kunt u het volume aanpassen.
U hoort een klik als u het volume verhoogt of verlaagt.



In te vullen door de hoorzorg professional

Aanpassen van het volume

LINKS





RECHTS

Kort drukken

Programma wijzigen

Uw hoortoestel heeft maximaal 4 verschillende programma's. Deze worden door uw hoorzorg professional geprogrammeerd.


In te vullen door de hoorzorg professional

Programma	Geluidsactivering	Wanneer te gebruiken
1	 "1 piepje"	
2	 "2 piepjes"	
3	 "3 piepjes"	
4	 "4 piepjes"	

miniRITE

Druk kort op de toets om van programma te veranderen

NB: als u twee hoortoestellen gebruikt, schakelt het RECHTER-hoortoestel vooruit van bijv. programma 1 naar 2 en het LINKER-hoortoestel terug van bijv. programma 4 naar 3.

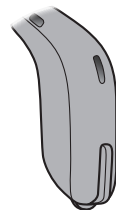

Programma wijzigen


Kort drukken

Lang drukken

miniRITE T

Druk op omhoog of omlaag om tussen programma's te schakelen

Let op: u kunt continu tussen programma's schakelen - zowel via de omhoog-toets als via de omlaag-toets in de volgorde van de ingestelde programma's. Als u bijvoorbeeld van programma 1 naar programma 4 wilt wisselen, dan kunt u op de omlaag-toets drukken in plaats van 3 keer op de omhoog-toets te drukken.

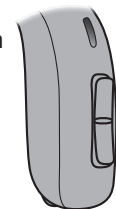

Programma wijzigen

LINKS

RECHTS


Kort drukken

Lang drukken

□ Dempen


U kunt de dempfunctie gebruiken om het hoortoestel uit te zetten. De dempfunctie dempt alleen de microfoon(s) op het hoortoestel.

miniRITE

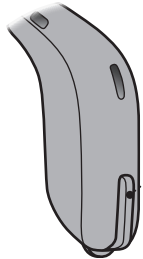

• Druk lang op de toets (4 seconden) om het hoortoestel te dempen. Door kort op de toets te drukken, kunt u het hoortoestel weer activeren.

miniRITE T

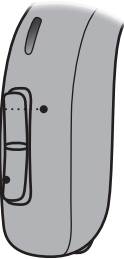

Druk op een van beide uiteinden van de toets

BELANGRIJKE OPMERKING

Gebruik de dempfunctie niet om het hoortoestel uit te zetten; het gebruikt dan nog steeds stroom.

Hoortoestellen gebruiken met iPhone en iPad

Uw hoortoestellen zijn Made for iPhone® en kunnen rechtstreeks communiceren en worden bediend met een iPhone, iPad® of iPod touch®. Voor assistentie bij het gebruik van deze producten met uw hoortoestellen kunt u contact opnemen met uw hoorzorg professional of onze website bezoeken: www.oticon.nl/connectivity




Ga voor meer informatie over compatibiliteit naar www.oticon.nl/compatibility

De Made for Apple badge betekent dat een accessoire is ontworpen om specifiek verbinding te maken met de op de badge aangegeven Apple producten en volgens de ontwikkelaar voldoet aan Apple prestatie-normen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of het beantwoorden ervan aan de veiligheidsnormen en voorschriften. NB: door gebruik van deze accessoire met iPod, iPhone, of iPad kunnen de draadloze prestaties afnemen.

Apple, het Apple logo, iPhone, iPad, en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponneerd in de VS en andere landen.


Koppelen met iPhone

1. Instellingen

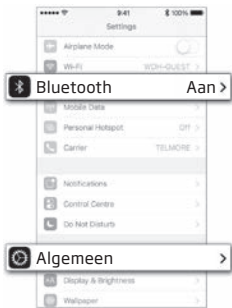


Ga op uw iPhone naar "Instellingen". Zorg ervoor dat Bluetooth aanstaat. Kies vervolgens "Algemeen".

2. Algemeen

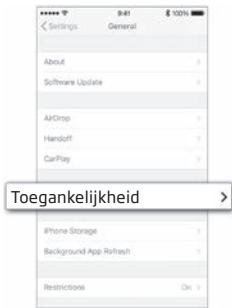


Kies "Toegankelijkheid" in het scherm "Algemeen".

3. Toegankelijkheid

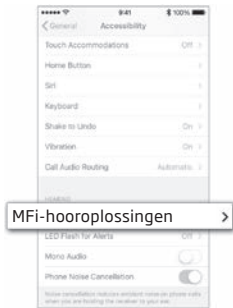

Kies "MFi-hoortoestellen" in het scherm "Toegankelijkheid".

4. Voorbereiden

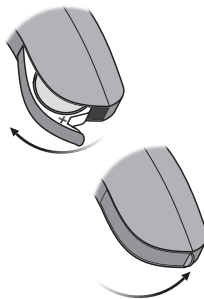


Open en sluit de batterijlade van beide hoortoestellen en plaats ze dichtbij uw iPhone. De hoortoestellen blijven voor 3 minuten in koppelingsstand staan.

5. Selecteren



Uw iPhone zal de hoortoestellen detecteren voor koppeling. Gedetecteerde apparaten verschijnen in uw iPhone lijst. Kies uw hoortoestellen.

6. Bevestig de koppeling

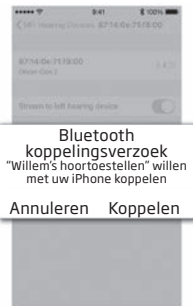

Bevestig koppeling. Als u twee hoortoestellen heeft, is koppelingsbevestiging voor beide hoortoestellen nodig.

Draadloze accessoires en andere opties

Als aanvulling op uw draadloze hoortoestel(len) is een reeks accessoires verkrijgbaar. Deze kunnen u helpen beter te horen en communiceren in vele alledaagse situaties.

ConnectClip

Als ConnectClip met uw mobiele telefoon is gekoppeld, kunt u het hoortoestel gebruiken als een handsfree headset of externe microfoon.

TV Adapter 3.0

Draadloze zender van geluid van televisies en elektronische audioapparaten. TV Adapter streamt geluid rechtstreeks naar uw hoortoestel.

Afstandsbediening 3.0

Biedt de mogelijkheid om het programma te wijzigen, het volume aan te passen of uw hoortoestel te dempen.

Oticon ON App

Biedt een intuïtieve, eenvoudige en discrete manier om uw hoortoestel te bedienen. Voor iPhone, iPad, iPod touch en Android™ apparaten.

Phone Adapter 2,0

Phone adapter 2.0 verbindt draadloos met de ConnectClip voor probleemloos dagelijks gebruik van traditionele telefoons.

AutoPhone - optioneel voor Oticon Opn en Oticon Siya

Als u een speciale magneet op uw telefoon plaatst, kan de AutoPhone automatisch een telefoonprogramma in het hoortoestel activeren.



Luisterspoel - optioneel voor miniRITE T

Met een luisterspoel kunt u beter horen als u een telefoon met ingebouwde ringleiding gebruikt of wanneer u in een gebouw met een ringleidingsysteem bent, zoals een schouwburg, kerk of collegezaal. Dit symbool of een vergelijkbaar teken wordt weergegeven op plaatsen waar een ringleidingsysteem aanwezig is.











Ga voor meer informatie naar: www.oticon.nl/connectivity of neem contact op met uw hoorzorg professional.


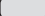

Geluids- en LEDindicaties


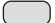



Alleen optioneel voor Oticon Opn Play miniRITE T


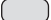

Er zijn verschillende geluids- en LEDindicaties om u de status van de hoortoestellen te laten zien. Op de volgende pagina's worden de verschillende opties vermeld.



Uw hoorzorg professional kan de geluids- en LEDindicaties afstemmen op uw voorkeuren.

Programmastatus	<input type="checkbox"/> Geluid	<input type="checkbox"/> LED	Opmerkingen (lampje)
Programma 1	1 piepje		Continu herhaald of 3 keer herhaald met kleine pauzes
Programma 2	2 piepjes		
Programma 3	3 piepjes		
Programma 4	4 piepjes		
Draadloze accessoires	2 piepjes		
Draadloze accessoires inclusief microfoon	2 piepjes		
Vliegtuigmodus	Geluid	<input type="checkbox"/> LED	
Vliegtuigmodus actief	4 piepjes		
Vliegtuigmodus niet actief	4 piepjes		

 Groen, kort knipperen  Groen, lang knipperen  Rood, kort knipperen

Aan	Geluid	LED	LED opmerkingen
Aan	<input type="checkbox"/> Startmelodietje	<input type="checkbox"/> 	Toon een keer
Volume	Geluid	LED	
Gewenst volume	<input type="checkbox"/> 2 piepjes	<input type="checkbox"/> 	Toon een keer
Minimum / maximum volume	<input type="checkbox"/> 3 piepjes	<input type="checkbox"/> 	
Volume hoger/lager	<input type="checkbox"/> 1 piepje	<input type="checkbox"/> 	
Dempen		<input type="checkbox"/> 	Continu herhaald of 3 keer herhaald met kleine pauzes

 Groen, kort knipperen  Groen, lang knipperen  Rood, kort knipperen

Waarschuwingen	Geluid	LED	LED opmerkingen
Indicatie lage batterijspanning	<input type="checkbox"/> 3 piepjes	<input type="checkbox"/> 	Continu herhaald
Batterij leeg	4 dalende tonen		
Microfoon onderhoudscontrole vereist	8 piepen 4 keer herhaald	<input type="checkbox"/> 	4 keer herhaald met kleine pauzes

 Rood, kort knipperen  Rood, lang knipperen

Tinnitus SoundSupport™ (optioneel)

Beoogd gebruik van Tinnitus SoundSupport

Tinnitus SoundSupport is een tool die geluiden genereert om tijdelijk verlichting te brengen aan mensen die lijden aan tinnitus, als onderdeel van een tinnitusbehandelprogramma.

Het is bedoeld voor volwassenen (18 jaar of ouder).

Tinnitus SoundSupport is bestemd voor erkende hoorzorg professionals (audiologen, hoortoestelspecialisten of KNO-artsen) die bekend zijn met het beoordelen en behandelen van tinnitus en gehoorverlies. De aanpassing van Tinnitus SoundSupport dient te worden uitgevoerd door een hoorzorg professional als onderdeel van een tinnitusbehandelprogramma.

Richtlijnen voor gebruikers van tinnitusgeluidsgenerators

Deze instructies bevatten informatie over Tinnitus SoundSupport. Uw hoorzorg professional kan dit geactiveerd hebben in uw hoortoestellen.

Tinnitus SoundSupport is een tinnitus management apparaat dat bedoeld is om geluid van voldoende intensiteit en bandbreedte te genereren om te helpen tinnitus beheersbaar te maken.

Uw hoorzorg professional kan u ook de juiste nazorg bieden. Het is belangrijk dat u het advies en de aanwijzingen voor wat betreft deze nazorg opvolgt.

Uitsluitend voor gebruik op voorschrift

Een persoon die meldt last te hebben van tinnitus dient volgens goed gebruik in de gezondheidszorg vóór het gebruik van een geluidsgenerator een medische beoordeling door een erkende oorarts te ondergaan. Deze beoordeling heeft tot doel om er zeker van te zijn dat alle medisch behandelbare klachten die tinnitus kunnen veroorzaken, onderkend en behandeld zijn vóór het gebruik van de geluidsgenerator.

Geluid- en volumeregeling

Tinnitus SoundSupport wordt door uw hoorzorg professional geprogrammeerd overeenkomstig uw gehoorverlies en voorkeuren voor tinnitusverlichting. Het heeft een aantal verschillende geluidsopties. Samen met uw hoorzorg professional kunt u uw voorkeursgeluid(en) selecteren.

Tinnitus SoundSupport programma's

Samen met uw hoorzorg professional beslist u in welke programma's u Tinnitus SoundSupport geactiveerd wilt hebben. De geluidsgenerator kan in maximaal vier verschillende programma's worden geactiveerd.

Dempen

Als u een programma heeft ingeschakeld waarin Tinnitus SoundSupport is geactiveerd, zal de dempfunctie alleen het omgevingsgeluid dempen, niet het geluid van Tinnitus SoundSupport.
Zie hoofdstuk: "Het hoortoestel dempen".

Volumeregeling met Tinnitus SoundSupport

Als u een hoortoestelprogramma selecteert waarvoor Tinnitus SoundSupport geactiveerd is, kan uw hoorzorg professional de druktoets op uw hoortoestel alleen instellen om te functioneren als volumeregeling voor het verlichtende tinnitusgeluid.

Uw hoorzorg professional kan de volumeregeling voor de geluidsgenerator op twee manieren instellen:

- A) Het volume voor ieder oor afzonderlijk aanpassen, of
- B) Het volume voor beide oren tegelijk aanpassen.

miniRITE

<input type="checkbox"/>	<p>A) Het volume van Tinnitus SoundSupport in ieder oor afzonderlijk aanpassen Om het geluidsvolume te verhogen (op slechts één hoortoestel), druk herhaaldelijk kort op de druktoets tot het gewenste niveau is bereikt. Het geluid zal bij de eerste paar keer drukken altijd harder zijn totdat u twee signalen hoort. Daarna neemt het volume af. Om het geluidsvolume te verlagen (op slechts één hoortoestel), blijft u herhaaldelijk op de druktoets drukken tot het gewenste niveau is bereikt.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>B) Het volume van Tinnitus SoundSupport in beide oren tegelijkertijd aanpassen U kunt één hoortoestel gebruiken om het geluid harder te zetten en het andere hoortoestel om het geluid zachter te zetten: Druk de toets van het RECHTER-hoortoestel kort in om het volume te verhogen. Druk de toets van het LINKER-hoortoestel kort in om het volume te verlagen.</p>

In te vullen door uw hoorzorg professional.

miniRITE T

<input type="checkbox"/>	<p>A) Het volume van Tinnitus SoundSupport in ieder oor afzonderlijk aanpassen Om het geluidsvolume te verhogen (op slechts één hoortoestel), druk herhaaldelijk kort op het bovenste gedeelte van de druktoets tot het gewenste niveau is bereikt. Druk om het volume (op slechts één hoortoestel) te verlagen herhaaldelijk kort op het onderste deel van de drukknop totdat het gewenste niveau is bereikt.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>B) Het volume van Tinnitus SoundSupport in beide oren tegelijkertijd aanpassen U kunt één hoortoestel gebruiken om het geluid in beide hoortoestellen harder of zachter te zetten. Als u het volume in één hoortoestel wijzigt, zal het volume van het andere hoortoestel volgen. Om het volume te verhogen drukt u kort op het bovenste deel van de druktoets. Om het volume te verlagen drukt u kort op het onderste deel van de druktoets.</p>

In te vullen door uw hoorzorg professional.

Beperking gebruiksduur

Dagelijks gebruik

Het volumeniveau van Tinnitus SoundSupport kan ingesteld worden op een niveau dat tot permanente gehoorbeschadiging kan leiden als het voor langere tijd wordt gebruikt. Uw hoorzorg professional zal u adviseren over de maximale tijd per dag dat u Tinnitus SoundSupport dient te gebruiken. Het dient nooit op een onaangenaam niveau gebruikt te worden.

Zie de tabel "Tinnitus SoundSupport: gebruiksbeperkingen" in het hoofdstuk "Uw individuele hoortoestelinstellingen" achter in dit boekje om te weten hoeveel uur per dag u het verlichtende geluid op uw hoortoestellen veilig kunt gebruiken.

Belangrijke informatie voor hoorzorg professionals over Tinnitus SoundSupport

Omschrijving van het apparaat

Tinnitus SoundSupport is een functiemodule die door een hoorzorg professional in de hoortoestellen geactiveerd kan worden.

Maximale draagtijd

De draagtijd van Tinnitus SoundSupport wordt minder als het niveau boven de 80 dB(A) SPL komt. De aanpassoftware toont automatisch een waarschuwing als het hoortoestel boven de 80 dB(A) SPL komt. Zie de indicatie van de maximale draagtijd naast de tinnitusaanpasgrafiek in de aanpassoftware.

De volumeregeling is gedeactiveerd

De volumeregeling van de geluidsgenerator is standaard gedeactiveerd op het hoortoestel. Het risico op blootstelling aan lawaai is groter als de volumeregeling is geactiveerd.

Als de volumeregeling is geactiveerd

Er kan een waarschuwing worden weergegeven als u de tinnitusvolumeregeling activeert in het scherm "Toetsen en indicaties". Dit gebeurt als het verlichtingsgeluid kan worden beluisterd op niveaus die gehoorschade kunnen veroorzaken. De tabel "Maximale draagtijd" in de aanpassoftware geeft het aantal uren aan dat de cliënt veilig gebruik kan maken van Tinnitus SoundSupport.

- Controleer de maximale draagtijd voor elk programma waarvoor Tinnitus SoundSupport is geactiveerd.
- Schrijf die waarden in de tabel: "Tinnitus SoundSupport: tijdsbeperkingen voor gebruik" achterin deze gebruiksaanwijzing.
- Geef uw cliënt overeenkomstige instructies.

Tinnitus SoundSupport waarschuwingen

Als uw hoorzorg professional de Tinnitus SoundSupport geluidsgenerator heeft geactiveerd, let dan op de volgende waarschuwingen.

Er is een aantal mogelijke problemen verbonden aan het gebruik van geluid dat door een tinnitus management apparaat wordt gegenereerd. Dit zijn onder andere het mogelijk verslechteren van tinnitus en/of een mogelijke verandering in gehoordrempels.

Als u een verandering in uw gehoor of tinnitus opmerkt of vaststelt, of enige duizeligheid, misselijkheid, hoofdpijn, hartkloppingen of eventuele huidirritatie bij het contactpunt met het apparaat, staak dan onmiddellijk het gebruik van het apparaat en raadpleeg een arts, hoorzorg professional of andere hoorzorgprofessional.

Zoals bij alle apparaten kan misbruik van de geluidsgenerator mogelijk schadelijke effecten tot gevolg hebben. U moet ervoor zorgen dat onbevoegd gebruik wordt voorkomen en dat het apparaat buiten bereik van kinderen en huisdieren wordt gehouden.

Maximale draagtijd

Volg altijd de maximale draagtijd per dag van de Tinnitus SoundSupport dat door uw hoorzorg professional is geadviseerd. Langer gebruik kan uw tinnitus of gehoorverlies verergeren.

Algemene waarschuwingen

In verband met uw persoonlijke veiligheid en om zeker te zijn van een correct gebruik, dient u uzelf geheel vertrouwd te maken met de volgende algemene waarschuwingen voordat u uw hoortoestel gaat gebruiken.

Merk op dat uw hoortoestellen het normale gehoor niet herstellen. Ze voorkomen of verbeteren gehoorverlies door een fysiologische aandoening ook niet. Merk tevens op dat in de meeste gevallen onregelmatig gebruik van een hoortoestel niet het volledige profijt zal opleveren.

Raadpleeg uw hoorzorg professional indien u een onverwachte werking van uw hoortoestel of ongewenst voorval ervaart.

Gebruik van hoortoestellen

Een hoortoestel mag alleen gebruikt worden zoals is voorgeschreven en ge-

adviseerd door de hoorzorg professional. Onoordeelkundig gebruik kan plotseling en blijvend gehoorverlies veroorzaken.

Sta nooit toe dat anderen uw toestel dragen. Verkeerd gebruik kan blijvend gehoorverlies veroorzaken.

Gevaar van stikken en het inslikken van batterijen en andere kleine onderdelen

Hoortoestellen, de onderdelen en de batterijen moeten uit de buurt worden bewaard van kinderen en personen die ze kunnen inslikken of zich er op een andere manier mee kunnen verwonden.

Het is vaker voorgekomen dat batterijen werden aangezien voor pillen. Controleer uw medicijnen daarom zorgvuldig voordat u ze inneemt.

Veel hoortoestellen kunnen op verzoek worden voorzien van een kindveilige batterijlade. Dit is sterk aan te bevelen

voor (jonge) kinderen en mensen met een verstandelijke beperking.

Kinderen jonger dan 36 maanden moeten altijd een kindveilige batterijlade gebruiken. Overleg met uw hoorzorg professional over de beschikbaarheid van deze optie.

Waarschuw onmiddellijk een arts bij inslikken van een hoortoestel of batterij.

Batterijgebruik

Gebruik altijd batterijen die zijn aanbevolen door uw hoorzorg professional. Batterijen van slechte kwaliteit kunnen lekken en lichamelijk letsel veroorzaken.

Probeer nooit om de batterijen opnieuw op te laden en verwijder ze niet door ze te verbranden. Er bestaat een kans dat de batterijen zullen ontploffen.

Slechte werking

Let op: er is een mogelijkheid dat de werking van uw hoortoestel kan worden beëindigd zonder voorafgaande melding. Houd dit in gedachten wanneer u afhan-

kelijk bent van waarschuwingsgeluiden (bijv. in het verkeer). De hoortoestellen kunnen stoppen met werken, bijvoorbeeld wanneer de batterijen leeg zijn of de slangetjes verstopt zijn door vocht of oorsmeer.

Actieve implantaten

Het hoortoestel is grondig getest en goed bevonden voor de menselijke gezondheid volgens de internationale normen voor menselijke blootstelling (Specific Absorption Ratio; specifieke energieabsorptietempo [SAR]), opgewekt elektromagnetisch vermogen en spanningen in het menselijk lichaam.

De blootstellingswaarden liggen onder de internationale aanvaardbare veiligheidsgrenzen voor SAR, opgewekt elektromagnetisch vermogen en spanningen in het menselijk lichaam die zijn gedefinieerd in de normen voor menselijke gezondheid en de coëxistentie met actieve medische implantaten, zoals pacemakers en defibrillators.

Algemene waarschuwingen

Als u een actief hersenimplantaat hebt, neem dan contact op met de fabrikant van het implantaat over het risico op verstoring.

De AutoPhone magneet en de MultiTool (die een ingebouwde magneet heeft) dienen meer dan 30 cm van het implantaat verwijderd te blijven, draag het bijvoorbeeld niet in uw borstzak.

Röntgenstraling, CT-, MRI-, PET-scans en elektrotherapie

Verwijder uw hoortoestel vóór het maken van een röntgenfoto, bij CT-, MRI-, en PET-scans, elektrotherapie of een operatie. Het hoortoestel kan beschadigen bij blootstelling aan sterke elektromagnetische velden.

Hitte en chemicaliën

Stel uw hoortoestel nooit bloot aan extreme hitte, bijvoorbeeld door het te laten liggen in een in de zon geparkeerde auto.

Het hoortoestel mag niet worden gedroogd in een magnetron of oven.

Chemicaliën in cosmetica, haarlak, parfum, aftershave lotion, zonnebrandcrème en insectenspray, kunnen uw hoortoestel beschadigen. Verwijder daarom altijd uw hoortoestel voordat u dergelijke producten aanbrengt en neem de tijd om het te laten drogen, voordat u uw hoortoestel weer plaatst.

Power-toestel

Bij het kiezen, passen en gebruiken van een hoortoestel met een maximale geluidsdruk van meer dan 132 dB SPL (IEC 711) is bijzondere aandacht vereist, omdat er een risico bestaat van aantas-

ting van het resterende gehoor van de gebruiker van het hoortoestel.

Raadpleeg het modellenoverzicht voorin dit boekje om te zien of uw hoortoestel een power-toestel is.

Mogelijke bijwerkingen

Hoortoestellen en oorstukjes kunnen voor een versnelde opbouw van oorsmeer zorgen.

De anders niet-allergene materialen die in hoortoestellen worden gebruikt kunnen in zeldzame gevallen huidirritatie of andere bijwerkingen veroorzaken.

Raadpleeg een arts als een van deze bijwerkingen optreedt.

Storing

Uw toestel is grondig getest op storing, volgens de strengste internationale normen. Er kan echter storing optreden tussen het hoortoestel en andere apparaten (bijvoorbeeld sommige mobiele

telefoons, zendapparatuur, winkelalarm-systemen en andere apparaten). Probeer in dat geval de afstand tussen het hoortoestel en de storende apparatuur te vergroten.

Gebruik in vliegtuigen

Uw hoortoestel is voorzien van Bluetooth. Aan boord van een vliegtuig dient de vliegtuigmodus te zijn ingeschakeld, tenzij Bluetooth door het cabinepersoneel wordt toegestaan.

Aansluiting op externe apparatuur

Wanneer het hoortoestel is aangesloten op externe apparatuur met de AUX-input-kabel is de veiligheid afhankelijk van de externe geluidsbron. Wanneer het toestel is aangesloten op externe apparatuur met netvoeding, moet deze apparatuur voldoen aan IEC-62368 (of IEC-60065, IEC-60950 tot 20 juni 2019) of gelijkwaardige veiligheidsvoorschriften.

Problemen oplossen

Klacht	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Geen geluid	Lege batterij	Vervang de batterij
	Verstopte oorstukjes (dome, GripTip of mould)	Reinig het oorstukje
	Hoortoestelmicrofoon gedempt	Vervang de oorsmeerfilter, dome of GripTip
Onderbroken of verminderd geluid	Verstopte geluidsopening	Hef de demping van de hoortoestelmicrofoon op
	Vocht	Maak het oorstukje schoon of vervang de oorsmeerfilter, dome of GripTip
Snerpend geluid	Vocht	Veeg de batterij met een droge doek af
	Het oorstukje van het hoortoestel is niet goed in het oor geplaatst	Plaats het oorstukje opnieuw
Piepen	Ophoping van oorsmeer in de gehoorgang	Laat de gehoorgang onderzoeken door uw arts
	Als uw hoortoestel 8 piepjes geeft, 4 keer achtereenvolgend, dan heeft de microfoon van uw hoortoestel een onderhoudscontrole nodig	Neem contact op met uw gehoorspecialist
Koppelingsproblemen met Apple apparaat	Bluetooth-verbinding mislukt	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ontkoppel uw hoortoestel (Instellingen Algemeen Toegankelijkheid Gehoorapparaten Apparaten Vergeet dit apparaat). 2) Schakel Bluetooth uit en weer in. 3) Open en sluit de batterijlade van de hoortoestellen. 4) Koppel de hoortoestellen opnieuw (zie paragraaf: "Koppelen met iPhone").
	Slechts één hoortoestel is gekoppeld	

Als bovenstaande oplossingen niet werken, raadpleeg dan uw hoorzorg professional.

Water- en stofbestendig (IP68)

Uw hoortoestel is water- en stofbestendig, wat betekent dat het ontworpen is om in alle dagelijkse situaties gedragen te worden. U hoeft zich dus geen zorgen te maken over zweet of regen. Volg de onderstaande richtlijnen wanneer uw hoortoestel in contact komt met water en niet langer werkt:

1. Veeg het water er voorzichtig af.
2. Open de batterijlade en haal de batterij eruit. Veeg eventueel aanwezig water voorzichtig uit de batterijlade.
3. Laat het hoortoestel met geopende batterijlade gedurende ongeveer 30 minuten drogen.
4. Plaats een nieuwe batterij.

BELANGRIJKE OPMERKING

Draag uw hoortoestel niet tijdens het douchen of tijdens activiteiten in het water. Dompel uw hoortoestel niet onder in water of andere vloeistoffen.

Gebruiksomstandigheden

Gebruiksomstandigheden	Temperatuur: +1 °C tot +40 °C Relatieve luchtvochtigheid: 5% tot 93%, niet-condenserend
Opslag- en transportomstandigheden	De temperatuur en luchtvochtigheid mogen niet voor een langere periode boven de volgende limieten uitkomen tijdens transport en opslag: Temperatuur: -25°C tot +60°C Relatieve luchtvochtigheid: 5% tot 93%, niet-condenserend

Garantie

Certificaat

Naam van eigenaar: _____

Hoorzorg professional: _____

Adres hoorzorg professional: _____

Telefoon hoorzorg professional: _____

Aankoopdatum: _____

Garantieperiode: _____ Maand: _____

Model links: _____ Serienr.: _____

Model rechts: _____ Serienr.: _____

Internationale garantie

Uw hoortoestel valt onder een internationale beperkte garantie die door de fabrikant is afgegeven voor de eerste twaalf maanden. Deze beperkte garantie dekt fabricage- en materiaalfouten in het hoortoestel zelf, maar niet in accessoires zoals batterijen, slangen, luidsprekers, oorstukjes en filters, enz. Problemen als gevolg van onjuist gebruik of onderhoud, overmatig gebruik, ongelukken, reparaties uitgevoerd door onbevoegden, blootstelling aan corrosie veroorzakende omstandigheden, fysieke veranderingen aan uw oor, schade door vreemde objecten in het toestel of onjuiste aanpassingen vallen NIET onder de beperkte garantie en kunnen deze

laten vervallen. De bovenstaande garantie heeft geen invloed op uw eventuele wettelijke rechten volgens de van toepassing zijnde nationale wetgeving betreffende de verkoop van consumentengoederen. Uw hoorzorg professional heeft mogelijk een garantie afgegeven die verder strekt dan de bepalingen van deze beperkte garantie. Raadpleeg uw hoorzorg professional voor meer informatie.

Als u ondersteuning nodig heeft
Bij problemen met uw hoortoestel kunt u het beste naar uw hoorzorg professional gaan. Kleine reparaties of aanpassingen kunnen daar vaak ter plekke worden verricht.

Technische informatie

Het hoortoestel bevat twee radiotechnologieën, welke hieronder worden beschreven:

Het hoortoestel bevat een radiozender die gebruik maakt van kortbereik magnetische inductietechnologie op 3,84 MHz. De magnetische veldsterkte van de zender is zeer zwak en is altijd lager dan 15 nW (gewoonlijk lager dan -40 dB μ A/m op een afstand van 10 meter).

Het hoortoestel bevat ook een radiozendontvanger Bluetooth Low Energy (BLE) en een propriëtaire radiotechnologie met kort bereik die beide op 2,4 GHz ISM-band werken. De radiozender is zwak en altijd lager

dan 3 mW, gelijk aan 4,8 dBm in totaal afgegeven vermogen.

Het hoortoestel voldoet aan de internationale normen betreffende elektromagnetische compatibiliteit en menselijke blootstelling.

In verband met de beperkte ruimte op het hoortoestel zijn alle relevante goedkeuringen opgenomen in dit boekje.

Meer informatie is te vinden in de "Technische gegevensbladen" op www.oticon.nl.

VS en Canada

Het hoortoestel bevat een radio-module met de volgende certificatie ID nummers:

miniRITE:

FCC ID: U28AUMRIT

IC: 1350B-AUMRIT

miniRITE T:

FCC ID: U28AUMRTE

IC: 1350B-AUMRTE

Het apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels en de RSS-normen voor licentievrijstelling van de Canadese Industrie.

Gebruik is toegestaan onder de volgende twee voorwaarden:

1. dit toestel mag geen schadelijke storing veroorzaken.
2. dit toestel moet alle ontvangen storing accepteren, waaronder storing die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Veranderingen of modificaties die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen het recht doen vervallen om dit toestel te gebruiken.

Dit klasse B digitale apparaat voldoet aan de Canadese ICES-003.

Opmerking: Uit tests is gebleken dat dit apparaat voldoet aan de grenzen voor een digitaal apparaat Klasse B, conform deel 15 van het FCC-reglement. Deze grenzen zijn bedoeld om bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie. Ook kan het radiofrequente energie uitstralen. Indien het apparaat niet geïnstalleerd en gebruikt wordt volgens de instructies, kan het schadelijke storing veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie. Als het apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt bij radio-

of tv-ontvangst, hetgeen kan worden gecontroleerd door het apparaat aan en uit te zetten, wordt de gebruiker geadviseerd te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen te treffen:

- Stel de ontvangende antenne opnieuw in of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een ander stroomcircuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Vraag de fabrikant of een ervaren radio/TV technicus om hulp.

De fabrikant verklaart hierbij dat dit hoortoestel voldoet aan de essentiële eisen en bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU.

Een conformiteitsverklaring is verkrijgbaar bij de fabrikant.



Vervaardigd door:
Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denemarken
www.oticon.global

CE 0543



Afval van elektronische apparatuur dient te worden weggegooid volgens de lokale voorschriften.

 **Bluetooth®**



IP68

Beschrijving van in dit boekje gebruikte symbolen



Waarschuwingen

Tekst aangeduid met een waarschuwingssymbool moet worden gelezen voordat het apparaat wordt gebruikt.



Fabrikant

Het apparaat is geproduceerd door de fabrikant wiens naam en adres naast het symbool worden vermeld. Geeft de fabrikant van het medische apparaat aan, zoals gedefinieerd in EU-Richtlijnen 90/385/EEG, 93/42/EEG en 98/79/EG.



CE-markering

Het apparaat voldoet aan Richtlijn 93/42/EEG inzake medische hulpmiddelen. Het viercijferige nummer geeft de aangemelde instantie aan.



Elektronisch afval (AEEA)

Recycle hoortoestellen, accessoires en batterijen volgens de lokale regelgeving. Hoortoestelgebruikers kunnen elektronisch afval ook inleveren bij hun hoorzorg professional voor verwijdering. Elektronische apparatuur die onder Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).



Regulatory Compliance Mark (RCM)

Het apparaat voldoet aan de vereisten betreffende elektrische veiligheid, elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrum voor apparaten bestemd voor de Australische of Nieuw-Zeelandse markt.

IP68

IP-code

Duidt de classificatie aan voor bescherming tegen de binnendringing van water en stofdeeltjes volgens EN 60529:1991/A1:2002.

IP6X duidt de totale bescherming tegen stof aan. IPX8 duidt de bescherming aan tegen de effecten van voortdurende onderdompeling in water.



Bluetooth

Bluetooth-logo

Geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. waar elk gebruik van dergelijke merken een licentie vereist.



Made for Apple badges

Duidt aan dat het apparaat compatibel is met iPhone, iPad en iPod touch.

Beschrijving van gebruikte symbolen op het reglementaire verpakkingsetiket



Droog houden

Duidt een medisch apparaat aan dat moet worden beschermd tegen vocht.



Waarschuwingssymbool

Zie de gebruiksinstructies voor waarschuwingen.



Catalogusnummer

Duidt het catalogusnummer van de fabrikant aan, zodat het medische apparaat kan worden geïdentificeerd.



Serienummer

Duidt het serienummer van de fabrikant aan, zodat een specifiek medisch apparaat kan worden geïdentificeerd.

Uw individuele hoortoestelinstellingen

In te vullen door uw hoorzorg professional.

Tinnitus SoundSupport: Gebruiksbeperkingen			
<input type="checkbox"/>	Geen gebruiksbeperkingen		
	Programma	Opstartvolume (Tinnitus)	Max volume (Tinnitus)
<input type="checkbox"/>	1	Max _____ uren per dag	Max _____ uren per dag
<input type="checkbox"/>	2	Max _____ uren per dag	Max _____ uren per dag
<input type="checkbox"/>	3	Max _____ uren per dag	Max _____ uren per dag
<input type="checkbox"/>	4	Max _____ uren per dag	Max _____ uren per dag

197903NL / 2018.12.03

Overzicht toestelinstellingen				
Links			Rechts	
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	Volumeregelaar	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	Programmaschakelaar	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	Dempen	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	Tinnitus SoundSupport	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
Indicators volumeregelaar				
<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit	Signalen bij min/max volume	<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit
<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit	Piept bij verandering volume	<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit
<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit	Signalen bij gewenst volume	<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit
Indicators batterij				
<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit	Waarschuwing lage batterijspanning	<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit

197903NL / 2018.12.03



oticon
PEOPLE FIRST

197903NL / 2018;12:03: Oticon Opn 5 & Oticon Opn Play Firmware
7.0, Oticon Opn Firmware 6.0 of eerder, Oticon Siya Firmware 1.0