

Handleiding:

Hoortoestellen koppelen met de Signia App



De Signia App

De Signia app geeft je alles wat je nodig hebt om optimaal van je hoortoestellen te genieten, helemaal afgestemd op jouw persoonlijke voorkeuren.

Het enige wat je nodig hebt, is je smartphone. De app is eenvoudig in gebruik en stelt je in staat om discreet het volume en andere instellingen te regelen.

Compatibiliteit

Apple apparaten: De Signia app is compatibel met alle Apple apparaten met iOS-versie 14.0 of hoger.

Android apparaten: De Signia app is compatibel met de meeste Android apparaten met Android 9.0 en hoger.

Scan de QR-code om te controleren of de Smartphone compatibel is met de Signia App:



Downloaden

Download de Signia app via:



Koppeling maken

Via Bluetooth (alleen mogelijk bij hoortoestellen met Bluetooth):

Met Apple apparaten

Stap 1/5:

Ga naar "Instellingen"

-> "Toegankelijkheid"

-> "Hoortoestellen"




Met Apple apparaten

Stap 2/5:

Zet de hoortoestellen uit en opnieuw aan tot ze zichtbaar worden in het Apple apparaat.

Klik erop

-> Druk vervolgens op "koppel"

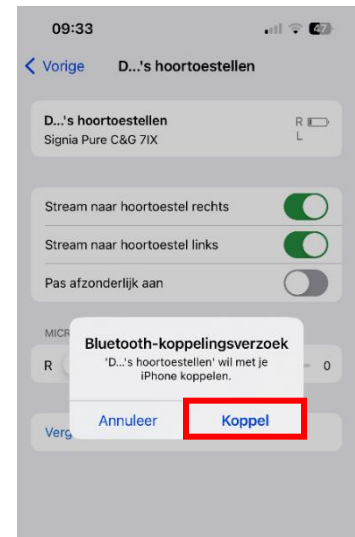

Met Apple apparaten

Stap 3/5:

De hoortoestellen zijn gekoppeld met het Apple apparaat.

Ga nadien naar de Signia App.




Met Apple apparaten

Stap 4/5:

In de Signia app kun je nu kiezen hoe je de hoortoestellen met de app koppelt. Kies voor de optie “Bluetooth”

-> de hoortoestellen verbinden automatisch

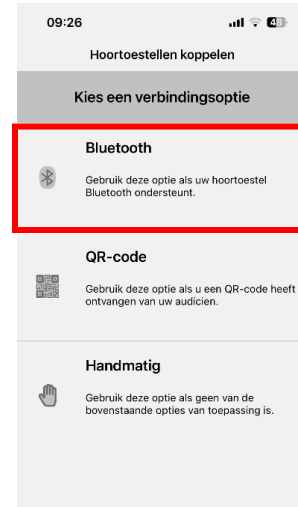

Met Apple apparaten

Stap 5/5:

Klik op “Aan de slag!” en je kan de app gebruiken.



Met Android apparaten

Stap 1/2:

Bij Android hoeft je alleen de Bluetooth van je smartphone aan te zetten en meteen de koppeling te maken in de Signia App via de Bluetooth optie.


Stap 2/2:

Volg de stappen in de Signia App om de koppeling te maken.

Via de QR-code (voor alle niet-Bluetooth hoortoestellen):

Stap 1/4:

Klik op "QR-code"

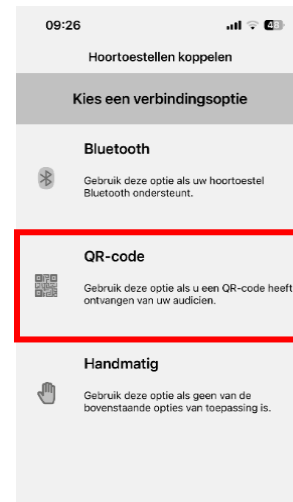



Stap 2/4:

Scan de QR-code met de camera.

Deze kan je terugvinden in de Connexx software bij:

-> "Documentatie"

-> ga naar de volgende pagina indien nodig en scan de QR-code

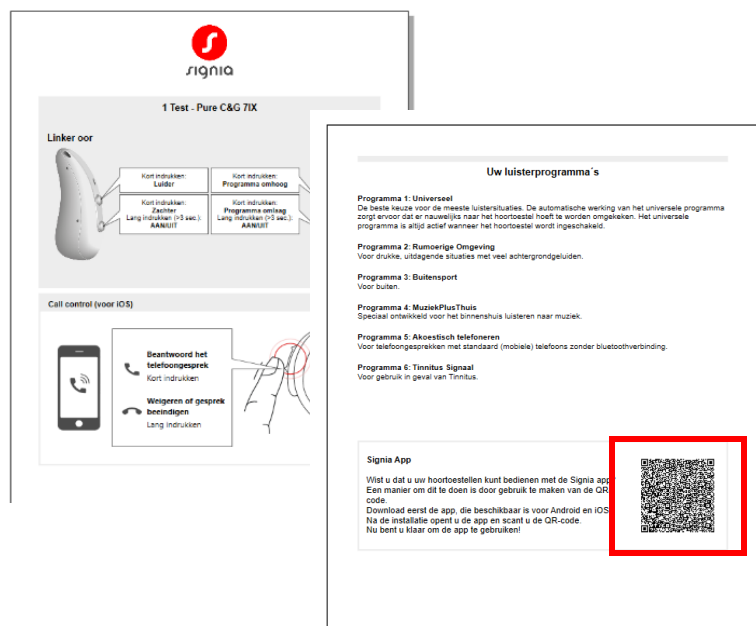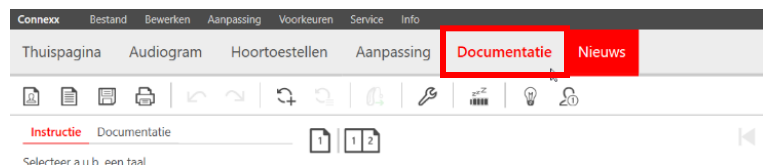


Stap 3/4:

Schakel de hoortoestellen uit en aan.

Druk op “Nu koppelen”

-> verhoog het volume van je Smartphone indien nodig

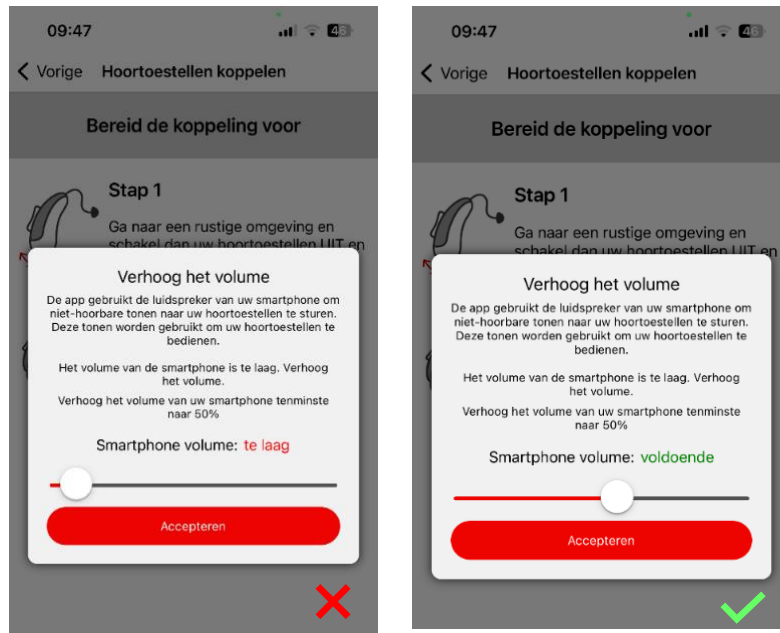

Stap 4/4:

Plaats de hoortoestellen in de oren om de bevestigingstoon te kunnen horen.


- ➔ Indien je de bevestigingstoon niet gehoord hebt, druk je op “Nee” en doe je de koppeling opnieuw
- ➔ Indien je de bevestigingstoon gehoord hebt, druk je op “Ja” en kun je de App gebruiken



Handmatig (voor alle niet-Bluetooth hoortoestellen):

Stap 1/5:

Klik op “Handmatig”

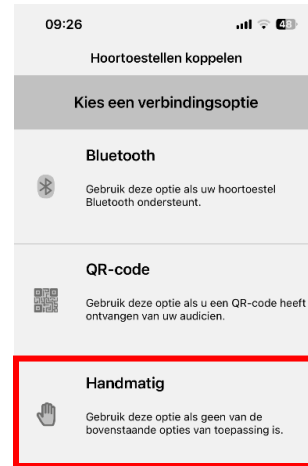

Stap 2/5:

Beantwoord de vraag of je een “Run”-model hebt als hoortoestel





Stap 3/5:

Schakel de hoortoestellen uit en aan.

Druk op “Nu koppelen”


-> verhoog het volume van je Smartphone indien nodig

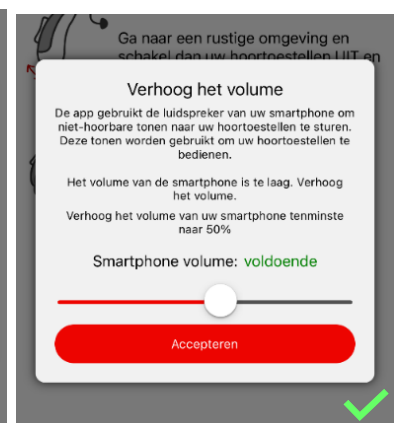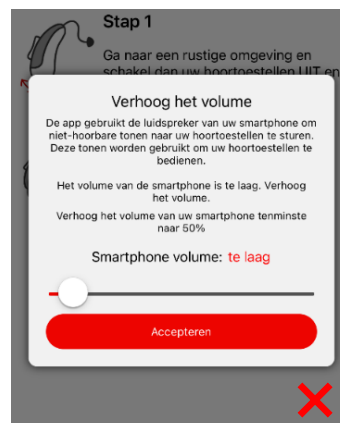

Stap 4/5:

Plaats de hoortoestellen in de oren
om de bevestigingstoon te kunnen horen.


- ➔ Indien je de bevestigingstoon niet gehoord hebt, druk je op “Nee” en doe je de koppeling opnieuw
- ➔ Indien je de bevestigingstoon gehoord hebt, druk je op “Ja” en kan je verder

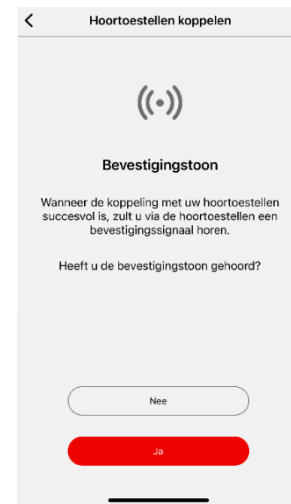


Stap 5/5:

Vraag de volgende zaken na bij uw hoorspecialist:

of uw toestellen directioneel
horen ondersteunen

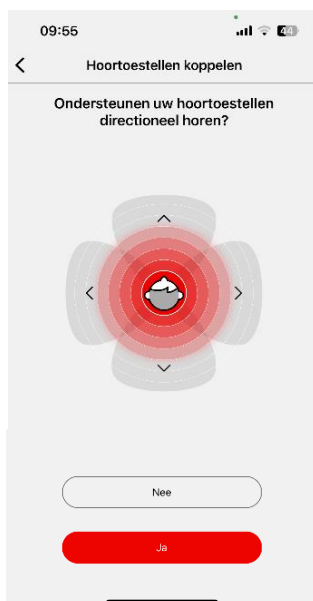

hoeveel luisterprogramma's
u heeft

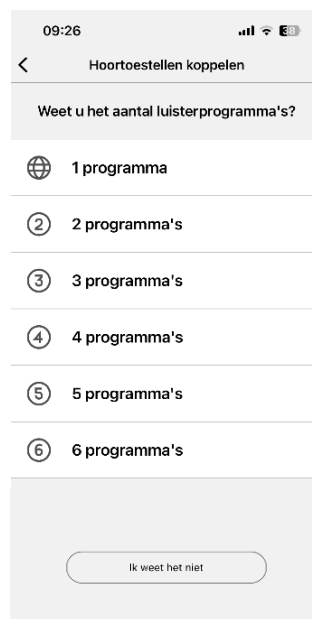

of u een programma
voor tinnitus heeft



Nadien is de App ingesteld en klaar voor gebruik.