



GEBRUIKSAANWIJZING **OORSETS**

VOOR WIDEX HOORTOESTELLEN



WIDEX


SOUND LIKE NO OTHER

OORSETS VOOR AHO-HOORTOESTELLEN

(In te vullen door de audicien)

Uw type oorset:

☐ DIRECTKLAAR-OORTIPS VOOR RIC/RITE-HOORTOESTELLEN

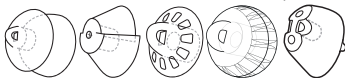

☐ OORTIPS EN OORSTUKJES OP MAAT VOOR RIC/RITE-HOORTOESTELLEN




☐ DIRECTKLAAR-OORTIPS VOOR HOORTOESTELLEN MET DUN SLANGETJE 0.9 EN 1.4



☐ OORTIPS OP MAAT VOOR HOORTOESTELLEN MET DUN SLANGETJE 0.9 EN 1.4



☐ DIRECTKLAAR-OORTIPS EN OORTIPS OP MAAT VOOR HOORTOESTELLEN MET KLASSIEK DUN SLANGETJE

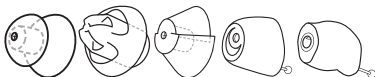

☐ OORSTUKJES VOOR HOORTOESTELLEN MET KLASSIEK SLANGETJE



INHOUD

EERSTE KENNISMAKING MET UW OORSET.....	6
Welkom.....	6
Telefoontje en dun slangetje bevestigen aan het hoortoestel.....	6
DIRECTKLAAR-OORTIPS VOOR RIC/RITE-MODELLEN.....	8
Reinigingsinstrumenten.....	8
Reinigen.....	9
Het oorsmeerfilter gebruiken.....	10
Vervangen van de oortip.....	12
Een anker gebruiken.....	12
OORTIPS EN OORSTUKJES OP MAAT VOOR RIC-/RITE-MODELLEN.....	14
Reinigingsinstrumenten.....	15
Reinigen.....	15
Het oorsmeerfilter gebruiken.....	16
DIRECTKLAAR-OORTIPS VOOR THIN TUBE 0.9 EN 1.4.....	19
Reinigingsinstrumenten.....	19
Reinigen.....	20
Het oorsmeerfilter gebruiken.....	21
Vervangen van de oortip.....	23
Vervangen van de Thin Tube.....	23
Een anker gebruiken.....	26

OORTIPS OP MAAT VOOR THIN TUBE 0.9 EN 1.4.....	28
Reinigingsinstrumenten.....	28
Reinigen.....	29
Het oorsmeerfilter gebruiken.....	30
DIRECTKLAAR-OORTIPS EN OORTIPS OP MAAT VOOR KLASSIEK DUN	
SLANGETJE.....	33
Reinigingsinstrumenten.....	33
Reinigen.....	34
Vervangen van de oortip.....	35
Vervangen van de Thin Tube.....	37
Een anker gebruiken.....	37
KLASSIEKE OORSTUKJES.....	40
Reinigingsinstrumenten.....	40
Reinigen.....	40
Vervangen van het slangetje.....	42
SYMBOLEN.....	43

EERSTE KENNISMAKING MET UW OORSET

Welkom


In deze gebruiksaanwijzing leest u hoe u uw oorset moet gebruiken. Wij adviseren u het hoofdstuk over uw specifieke oorset aandachtig door te lezen in verband met belangrijke informatie over het schoonmaken en het verwisselen van onderdelen.

LET OP

Uw oorsets en bepaalde onderdelen van uw oorsets kunnen verschillen van de hier getoonde afbeeldingen. We behouden ons tevens het recht voor om - indien nodig - veranderingen aan te brengen.

Telefoontje en dun slangetje bevestigen aan het hoortoestel

Voor alle oorsets is het van belang dat het telefoontje/het dunne slangetje op de juiste wijze aan het hoortoestel wordt bevestigd.

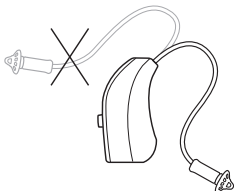**Juiste bevestiging**

Het telefoontje/het dunne slangetje moet van het hoortoestel af wijzen.

Verkeerde bevestiging

Het telefoontje/het dunne slangetje mag niet over het hoortoestel heen buigen.


DIRECTKLAAR-OORTIPS VOOR RIC/RITE-MODELLEN

Dit hoofdstuk beschrijft de manier van reinigen van en omgaan met verschillende DirectKlaar-oortips voor RIC-/RITE-modellen. De afbeeldingen tonen een hoortoestel met een open oortip, maar de procedure voor andere DirectKlaar-oortips is identiek.



Reinigingsinstrumenten

Bij uw hoortoestel ontvangt u de volgende reinigingsinstrumenten.

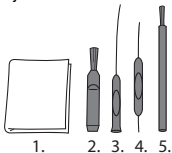


1. Doekje
2. Borstel
3. Lang reinigingspennetje
4. Kort reinigingspennetje
5. Batterijmagneet

Reinigen



Zorg ervoor dat de oorset altijd schoon en vrij van oorsmeer, vocht en dergelijke is. Reinig het draadje na elk gebruik met het meegeleverde doekje.

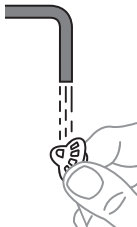

Indien nodig kunt u de DirectKlaar-oortip **loshalen van de rest van de oorset** en wassen met lauw water. 's Nachts laten drogen.



Gebruik geen vloeistoffen of desinfectiemiddelen om uw oorset te reinigen.



De ontvanger mag **nooit** in contact komen met water, omdat dat de ontvanger kan beschadigen.


Zie voor instructies voor het vervangen van het oorsmeerfilter het hoofdstuk over het oorsmeerfilter.

Het oorsmeerfilter gebruiken


Het oorsmeerfilter helpt om het hoortoestel tegen het binnendringen van oorsmeer te beschermen. Gebruik altijd een Widex oorsmeerfilter bij uw hoortoestel.

Controleer regelmatig op de volgende manier of het oorsmeerfilter niet is verstopt met oorsmeer:

Haal eerst de oortip los van het draadje. Vervang het oorsmeerfilter als er oorsmeer in zit.

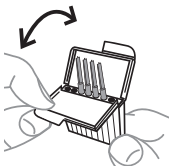

Open de behuizing van het oorsmeerfilter zoals op de afbeelding.

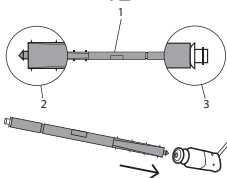

Het oorsmeerfilter bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Pennetje
2. Haakje
3. Oorsmeerfilter


Steek het haakje in het gebruikte oorsmeerfilter.



Trek het gebruikte oorsmeerfilter er loodrecht uit.



Draai het pennetje om.

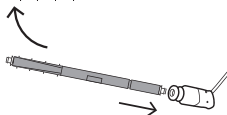

Plaats het nieuwe oorsmeerfilter in de opening van de geluidsuitgang. Trek het pennetje er recht uit. Het nieuwe oorsmeerfilter komt vanzelf los van het pennetje. Druk het oorsmeerfilter voorzichtig op een oppervlak om te zorgen dat het goed blijft zitten. Druk de oortip terug.





Het oorsmeerfilter kan niet worden hergebruikt en is niet bedoeld om te worden gereinigd.




Zit een oorsmeerfilter los in het busje, verwijder het dan en gebruik een nieuw filter.



Als het oorsmeerfilter loslaat in het oor, laat u het verwijderen door uw arts of audicien. Probeer **NOOIT** het oorsmeerfilter zelf te verwijderen.

Vervangen van de oortip

Vervang de oortip regelmatig. Neem contact op met uw audicien als u meer oortips nodig hebt of als de maat niet langer in uw oor past.

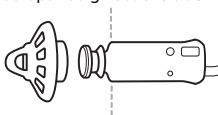

Druk de nieuwe oortip op de ontvanger tot het punt aangegeven met de stippellijn.

Als u de ontvanger in de oortip drukt, moet u voelen dat deze vastklikt.

LET OP

Het is erg belangrijk dat de oortip goed vastzit.




Probeer het draadje nooit los te halen van het hoortoestel.

Een anker gebruiken

Als u een DirectKlaar-oortip hebt, kunt u een anker gebruiken om ervoor te zorgen dat de oortip comfortabel in uw oor blijft zitten.

Hieronder ziet u hoe u de ankervariant die u hebt ontvangen kunt koppelen aan uw oorset:

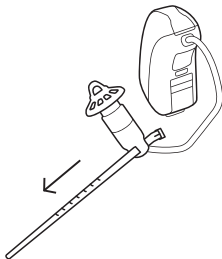


Anker

Trek het puntige uiteinde van het anker door de opening aan de zijkant van het slangetje.

Trek het anker aan totdat het tegengehouden wordt door de grip aan het einde.

Uw oorset is nu klaar voor gebruik.

Plaats de oorset zo dat deze comfortabel in het oor zit.

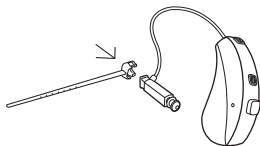

Anker met vergrendeling


Druk de ankervergrendeling richting het platte uiteinde van het telefoontje totdat deze vastklikt.

Uw oorset is nu klaar voor gebruik.

Plaats de oorset zo dat deze comfortabel in het oor zit.

OORTIPS EN OORSTUKJES OP MAAT VOOR RIC-/RITE-MODELLEN

Dit hoofdstuk beschrijft de manier van reinigen van en omgaan met verschillende oortips en oorstukjes op maat voor RIC-/RITE-modellen. De afbeeldingen tonen een hoortoestel met een oortip, tenzij anders aangegeven.

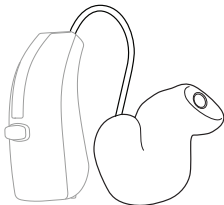


LET OP

Gebruik altijd het trekkoordje om de maatoortip uit uw oor te halen.

Reinigingsinstrumenten

Bij uw hoortoestel ontvangt u de volgende reinigingsinstrumenten.

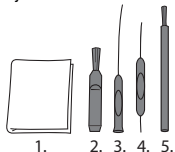

1. Doekje
2. Borstel
3. Lang reinigingspennetje
4. Kort reinigingspennetje
5. Batterijmagneet


Reinigen



Zorg ervoor dat de oorset altijd schoon en vrij van oorsmeer, vocht en dergelijke is. Reinig het draadje na elk gebruik met het meegeleverde doekje.



Verwijder zichtbaar oorsmeer rond de geluidsuitgang met het kleine borsteltje of het doekje. Als de geluidsuitgang is geblokkeerd, moet u het oorsmeerfilter vervangen. Probeer het oorsmeerfilter **NOOIT** te reinigen.

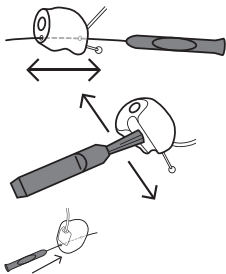

Uw oortip/oorstukje kan voorzien zijn van een ontluuchtingskanaal. De afbeeldingen links tonen hoe de verschillende typen ontluuchtingskanalen moeten worden gereinigd.



De oorset mag nooit in contact komen met vloeistoffen, zoals water of reinigingsmiddelen.



Probeer nooit het draadje van de oortip/het oorstukje op maat of het hoortoestel te halen, aangezien het draadje hierdoor beschadigd kan raken.



Trek nooit aan het draadje om uw hoortoestel uit uw oor te verwijderen.


Het oorsmeerfilter gebruiken

Het oorsmeerfilter helpt om het hoortoestel tegen het binnendringen van oorsmeer te beschermen. Gebruik altijd een Widex oorsmeerfilter bij uw hoortoestel.


Controleer regelmatig of het oorsmeerfilter niet is verstopt met oorsmeer.



Verwijder oortips/oorstukjes op maat **NOOIT** van het draadje.

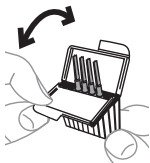


Open de behuizing van het oorsmeerfilter zoals op de afbeelding.

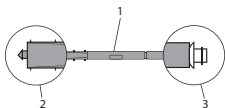


Het oorsmeerfilter bestaat uit de volgende onderdelen:


1. Penetjer
2. Haakje
3. Oorsmeerfilter

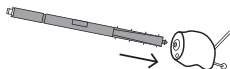


Steek het haakje in het gebruikte oorsmeerfilter.

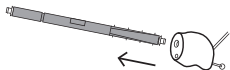

Trek het gebruikte oorsmeerfilter er loodrecht uit.

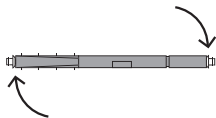

Draai het penetjer om.

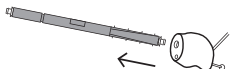

Plaats het nieuwe oorsmeerfilter in de opening van de geluidsuitgang. Trek het pennetje er recht uit. Het nieuwe oorsmeerfilter komt vanzelf los van het pennetje. Druk het oorsmeerfilter voorzichtig op een glad oppervlak om te zorgen dat het goed blijft zitten.



Het oorsmeerfilter kan niet worden hergebruikt en is niet bedoeld om te worden gereinigd.



Zit een oorsmeerfilter los in het busje, verwijder het dan en gebruik een nieuw filter.



Als het oorsmeerfilter loslaat in het oor, laat u het verwijderen door uw arts of audicien. Probeer **NOOIT** het oorsmeerfilter zelf te verwijderen.


DIRECTKLAAR-OORTIPS VOOR THIN TUBE 0.9 EN 1.4

Dit hoofdstuk beschrijft de manier van reinigen van en omgaan met DirectKlaar-oortips voor hoortoestellen met Thin Tube 0.9 en 1.4.



Reinigingsinstrumenten

Bij uw hoortoestel ontvangt u de volgende reinigingsinstrumenten.

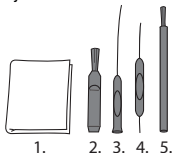


1. Doekje
2. Borstel
3. Lang reinigingspennetje
4. Kort reinigingspennetje
5. Batterijmagneet

Reinigen



Zorg ervoor dat de oorset altijd schoon en vrij van oorsmeer, vocht en dergelijke is. Reinig het slangetje na elk gebruik met het doekje.

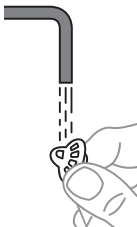

Indien nodig kunt u de DirectKlaar-oortip **loshalen van de rest van de oorset** en wassen met lauw water. 's Nachts laten drogen.



Gebruik geen vloeistoffen of desinfectiemiddelen om uw oorset te reinigen.


Zie voor instructies voor het vervangen van het oorsmeerfilter het hoofdstuk over het oorsmeerfilter.

Het oorsmeerfilter gebruiken

Het oorsmeerfilter helpt om het hoortoestel tegen het binnendringen van oorsmeer te beschermen. Gebruik altijd een Widex oorsmeerfilter bij uw hoortoestel.

Controleer regelmatig op de volgende manier of het oorsmeerfilter niet is verstopt met oorsmeer:

Haal eerst de oortip los van het slangetje. Vervang het oorsmeerfilter als er oorsmeer in zit. Probeer **NOOIT** het oorsmeerfilter te reinigen.

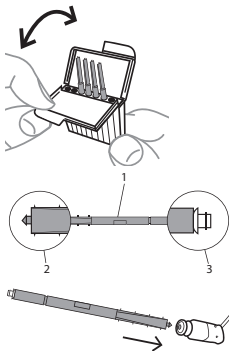


Open de behuizing van het oorsmeerfilter zoals op de afbeelding.

Het oorsmeerfilter bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Pennetje
2. Haakje
3. Oorsmeerfilter

Steek het haakje in het gebruikte oorsmeerfilter.

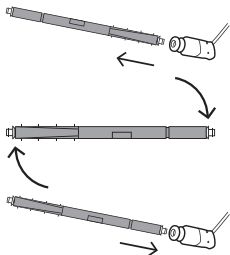

Trek het gebruikte oorsmeerfilter er loodrecht uit.

Draai het pennetje om.

Plaats het nieuwe oorsmeerfilter in de opening van de geluidsuitgang. Trek het pennetje er recht uit. Het nieuwe oorsmeerfilter komt vanzelf los van het pennetje. Druk het oorsmeerfilter voorzichtig op een oppervlak om te zorgen dat het goed blijft zitten. Druk de oortip terug.





Het oorsmeerfilter kan niet worden hergebruikt en is niet bedoeld om te worden gereinigd.




Zit een oorsmeerfilter los in het busje, verwijder het dan en gebruik een nieuw filter.



Als het oorsmeerfilter loslaat in het oor, laat u het verwijderen door uw arts of audicien. Probeer **NOOIT** het oorsmeerfilter zelf te verwijderen.

Vervangen van de oortip

Vervang de oortip regelmatig. Neem contact op met uw audicien als u meer oortips nodig hebt of als de maat niet langer in uw oor past.

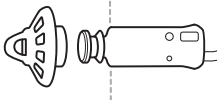

Druk de nieuwe oortip op de Thin Tube tot het punt aangegeven met de stippellijn.

Als u het eind van het slangetje in de oortip drukt, moet u voelen dat deze vastklikt.

LET OP

Het is erg belangrijk dat de oortip goed vastzit.

Vervangen van de Thin Tube

Vervang het slangetje zo vaak als nodig is. Neem contact op met uw audicien als u meer slangetjes nodig hebt.

Gebruik voor het verwijderen van het slangetje aan het hoortoestel het bij uw Thin Tube geleverde speciale instrument.


LET OP

Er zijn verschillende instrumenten beschikbaar. Volg de onderstaande instructies voor het speciale instrument dat u hebt ontvangen.


Breed instrument




1. Plaats het slangetje in het instrument, zie afbeelding.

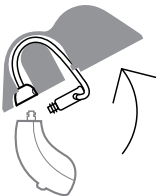

2. Til de oorset onder een hoek van het hoortoestel, zie afbeelding.

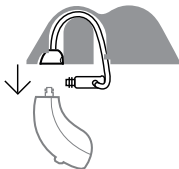


Smal instrument

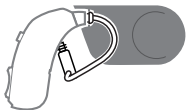

3. Plaats het nieuwe slangetje in het instrument en klik het op het hoortoestel.

1. Plaats het slangetje in het instrument, zie afbeelding.

2. Druk het instrument onder een hoek naar beneden, zie afbeelding.

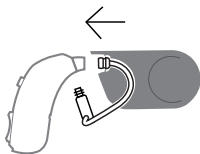


3. Plaats het nieuwe slangetje in het instrument en klik het op het hoortoestel.

Een anker gebruiken


U kunt het anker gebruiken om te garanderen dat de oortip comfortabel in het oor blijft zitten.

Hieronder ziet u hoe u de ankervariant die u hebt ontvangen kunt koppelen aan uw oorset:

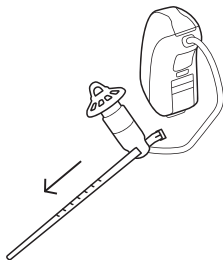

Anker

Trek het puntige uiteinde van het anker door de opening aan de zijkant van het slangetje. Trek het anker aan totdat het tegengehouden wordt door de grip aan het einde. Uw oorset is nu klaar voor gebruik. Plaats de oorset zo dat deze comfortabel in het oor zit.

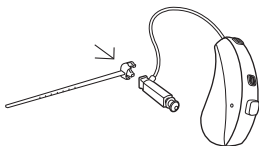


Anker met vergrendeling

Druk de ankervergrendeling richting het platte uiteinde van het telefoontje totdat deze vastklikt. Uw oorset is nu klaar voor gebruik. Plaats de oorset zo dat deze comfortabel in het oor zit.

OORTIPS OP MAAT VOOR THIN TUBE 0.9 EN 1.4

Dit hoofdstuk beschrijft de manier van reinigen van en omgaan met maatoortips voor hoortoestellen met Thin Tube 0.9 en 1.4.

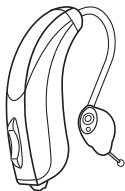


LET OP

Gebruik altijd het trekkoordje om de **maatoortip** uit uw oor te halen.

Reinigingsinstrumenten

Bij uw hoortoestel ontvangt u de volgende reinigingsinstrumenten.

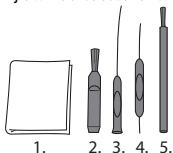


1. Doekje
2. Borstel
3. Lang reinigingspennetje
4. Kort reinigingspennetje
5. Batterijmagneet

Reinigen



Zorg ervoor dat de oorset altijd schoon en vrij van oorsmeer, vocht en dergelijke is. Reinig het slangetje na elk gebruik met het doekje.

Verwijder zichtbaar oorsmeer rond de geluidsuitgang met het kleine borsteltje of het doekje. Als de geluidsuitgang verstopt is, moet het oorsmeerfilter worden vervangen. Probeer **NOOIT** het oorsmeerfilter te reinigen.

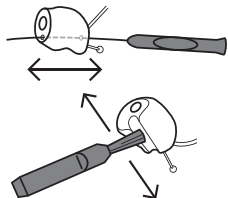

Uw oortip kan voorzien zijn van een ontluchtingskanaal. De afbeeldingen hieronder tonen hoe de verschillende typen ontluchtingskanalen moeten worden gereinigd.



De oorset mag nooit in contact komen met vloeistoffen, zoals water of reinigingsmiddelen.



Trek nooit aan het slangetje om uw hoortoestel uit uw oor te verwijderen.


Het oorsmeerfilter gebruiken

Het oorsmeerfilter helpt om het hoortoestel tegen het binnendringen van oorsmeer te beschermen. Gebruik altijd een Widex oorsmeerfilter bij uw hoortoestel.


Controleer regelmatig of het oorsmeerfilter niet is verstopt met oorsmeer.



Verwijder de oortip op maat **NOOIT** van het slangetje.

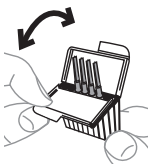


Open de behuizing van het oorsmeerfilter zoals op de afbeelding.

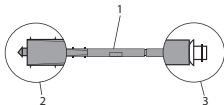


Het oorsmeerfilter bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Penjetje
2. Haakje
3. Oorsmeerfilter

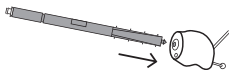


Steek het haakje in het gebruikte oorsmeerfilter.

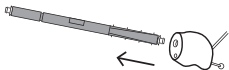

Trek het gebruikte oorsmeerfilter er loodrecht uit.



Draai het pennetje om.

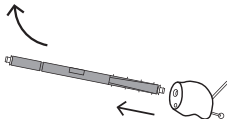

Plaats het nieuwe oorsmeerfilter in de opening van de geluidsuitgang. Trek het pennetje er recht uit. Het nieuwe oorsmeerfilter komt vanzelf los van het pennetje. Druk het oorsmeerfilter voorzichtig op een glad oppervlak om te zorgen dat het goed blijft zitten.





Het oorsmeerfilter kan niet worden hergebruikt en is niet bedoeld om te worden gereinigd.




Zit een oorsmeerfilter los in het busje, verwijder het dan en gebruik een nieuw filter.



Als het oorsmeerfilter loslaat in het oor, laat u het verwijderen door uw arts of audicien. Probeer **NOOIT** het oorsmeerfilter zelf te verwijderen.


DIRECTKLAAR-OORTIPS EN OORTIPS OP MAAT VOOR KLASSIEK DUN SLANGETJE

Dit hoofdstuk beschrijft de manier van reinigen en omgaan met verschillende oortips voor AHO-modellen met een klassiek dun slangetje.

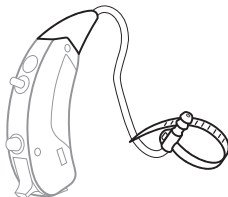


Reinigingsinstrumenten

Bij uw hoortoestel ontvangt u de volgende reinigingsinstrumenten.

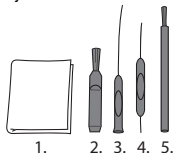

1. Doekje
2. Borstel
3. Lang reinigingspennetje
4. Kort reinigingspennetje
5. Batterijmagneet

Reinigen

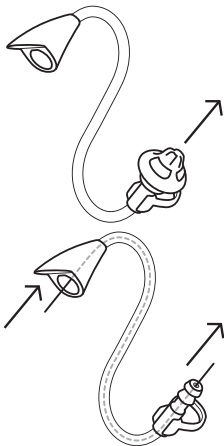

Trek de oortip voorzichtig van het slangetje.

Als u een oortip op maat hebt, hoeft u deze niet te verwijderen bij het reinigen van het slangetje.

Gebruik een reinigingsdraad voor het reinigen van het slangetje. Trek de draad door het slangetje. Trek de draad aan het andere uiteinde aan. Neem voor meer informatie over het bestellen van reinigingsdraden contact op met uw audicien. Indien nodig kunt u de DirectKlaar-oortip **loshalen van de rest van de oorset** en wassen met lauw water. 's Nachts laten drogen.




Gebruik nooit alcohol of andere reinigingsmiddelen om de oorset te reinigen, omdat hierdoor verkleuring kan optreden.

Vervangen van de oortip

Een DirectKlaar-oortip op het slangetje plaatsen

Breng het slangetje voorzichtig tot aan het einde in de oortip. Het is erg belangrijk dat het slangetje goed vastzit.

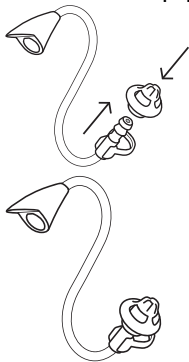


Een maatoortip op het slangetje plaatsen




Houd de maatoortip vast en druk het slangetje voorzichtig in de oortip, zie afbeelding. Gebruik uw nagel om het slangetje zo ver mogelijk naar binnen te duwen.

Vervangen van de Thin Tube

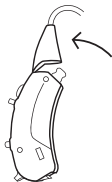

Til het dunne slangetje schuin naar achteren van het hoortoestel, zie afbeelding.


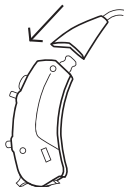


Klik het dunne slangetje bovenop het hoortoestel, zie afbeelding.

Een anker gebruiken

Het geïntegreerde anker wordt niet gebruikt bij een DirectKlaar dubbele oortip en moet volledig worden afgesneden.

Als u een open oortip of een tulp oortip hebt, moet u het anker zo afknippen dat er een lus van de juiste grootte ontstaat om de oortip goed en comfortabel in het oor te houden. Knip uw anker als volgt op maat:

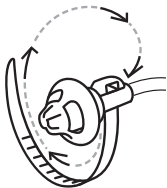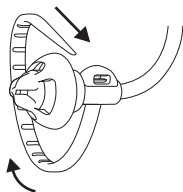


Voorbeeld 1

Trek de punt van het anker door de kleine opening in de zijkant van het slangetje.

Als de lus de juiste grootte heeft, knipt u het teveel met een schaar o.i.d. af.

Voorbeeld 2

Maak een lus van het anker, zoals aangegeven door de stippellijn en pijltjes.

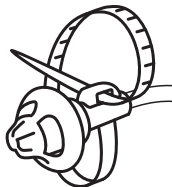

Trek de punt van het anker door de kleine opening aan het einde van het slangetje zoals aangegeven en vorm een hartvormige lus.



Als de lus de juiste grootte heeft, draait u de oorset om en knipt u het teveel met een schaar o.i.d. af.

De ankerlus heeft de juiste grootte als deze de positie van het hoortoestel in het oor ondersteunt en de oorset goed in en op het oor zit.

LET OP

Zorg ervoor dat het uiteinde van de ankerlus exact gelijk ligt met de kleine opening en dat er geen scherpe randen overblijven, aangezien dit irritatie in het oor kan veroorzaken. Gebruik uw vingertop om te controleren of er scherpe randen zijn.

LET OP


Het geïntegreerde anker wordt NIET gebruikt bij een oorset op maat en moet volledig worden afgesneden.

KLASSIEKE OORSTUKJES

Dit hoofdstuk beschrijft de manier van reinigen en omgaan met klassieke oorstukjes voor AHO-modellen.

Reinigingsinstrumenten

Bij uw hoortoestel ontvangt u de volgende reinigingsinstrumenten.

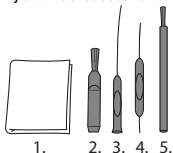

1. Doekje
2. Borstel
3. Lang reinigingspennetje
4. Kort reinigingspennetje
5. Batterijmagneet

Reinigen



Zorg ervoor dat de oorset altijd schoon en vrij van oorsmeer en vocht is. Maak uw oorset na gebruik schoon met een doekje.




Als u een ontluchtingskanaal hebt, moet u dit reinigen met het reinigingspennetje.



Haal het slangetje en het oorstukje regelmatig los van het haakje van het hoortoestel.



Spoel het slangetje en het oorstukje grondig af in lauw water.
Laat ze 's nachts drogen.

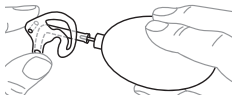

Als er vocht in het oorstukje of het slangetje zit, kunt u een föhn o.i.d. gebruiken om ze droog te blazen voordat u het slangetje aan het haakje vastmaakt.



Gebruik nooit alcohol of andere reinigingsmiddelen om de oorset te reinigen, omdat hierdoor verkleuring kan optreden.

Vervangen van het slangetje

Als het slangetje van uw oorset kapotgaat, moet u het slangetje vervangen.

Neem contact op met uw audicien als u meer slangetjes nodig hebt of als het oorstukje niet langer in uw oor past.

SYMBOLLEN

Veelgebruikte symbolen door WSAUD A/S voor de etikettering van medische hulpmiddelen (labels/IFU/enz.)

Symbool **Titel/beschrijving**



Fabrikant

Het product wordt geproduceerd door de fabrikant waarvan de naam en het adres naast het symbool staan. Indien van toepassing wordt ook de productiedatum genoemd.



Catalogusnummer

Het catalogus-/artikelnummer van het product.



Zie de gebruiksaanwijzingen

In de gebruiksaanwijzingen staat belangrijke waarschuwingsinformatie (waarschuwingen/voorzorgsmaatregelen) die vóór gebruik van het product moet worden gelezen.



Waarschuwing

Tekst met een waarschuwingssymbool moet vóór gebruik van het product worden gelezen.



WEEE-markering

“Niet bij het reguliere afval”. Als het product wordt afgedankt, moet het voor recycling worden ingeleverd bij een inzamelpunt om te voorkomen dat de aanwezige gevaarlijke stoffen schade toebrengen aan het milieu of schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen.

Symbool Titel/beschrijving



CE-markering

Het product voldoet aan de eisen in de Europese richtlijnen inzake het CE-keurmerk.



RCM-markering

Het product voldoet aan de wet- en regelgeving op het gebied van elektrische veiligheid, EMC en radioband voor producten die op de Australische of Nieuw-Zeelandse markt worden gebracht.



WSAUD A/S

Nymoellevej 6, DK-3540 Lyngby, Denmark

<https://global.widex.com>

Gebruiksaanwijzing

no:

9 514 0561 007 02

uitgave:

2022-04



9 514 0561 007 02