

Bernafon Encanta miniBTE R

Meer flexibiliteit bij
aanpassingen in één
unieke oplossing




Bernafon

Twée aanpasniveaus, één krachtig apparaat

Het kan lastig zijn om met bestaande BTE-toestellen te voldoen aan de behoeften van uw cliënten met diverse gehoorverliezen. Nu, voor het eerst, voldoet de Bernafon Encanta miniBTE R met twee aanpasniveaus (85 en 105) gemakkelijker aan de behoeften van zowel cliënten met matig als ernstig gehoorverlies – dankzij een vernieuwde, uiterst flexibele en krachtige luidspreker.

Beter gehoor, vandaag en morgen

Gehoorverlies kan in de loop der tijd verergeren. Omdat uw cliënten met matig gehoorverlies mogelijk de grens van ernstiger gehoorverlies naderen, beschikt u nu over de flexibiliteit om hen vandaag, morgen en over jaren beter te laten horen.

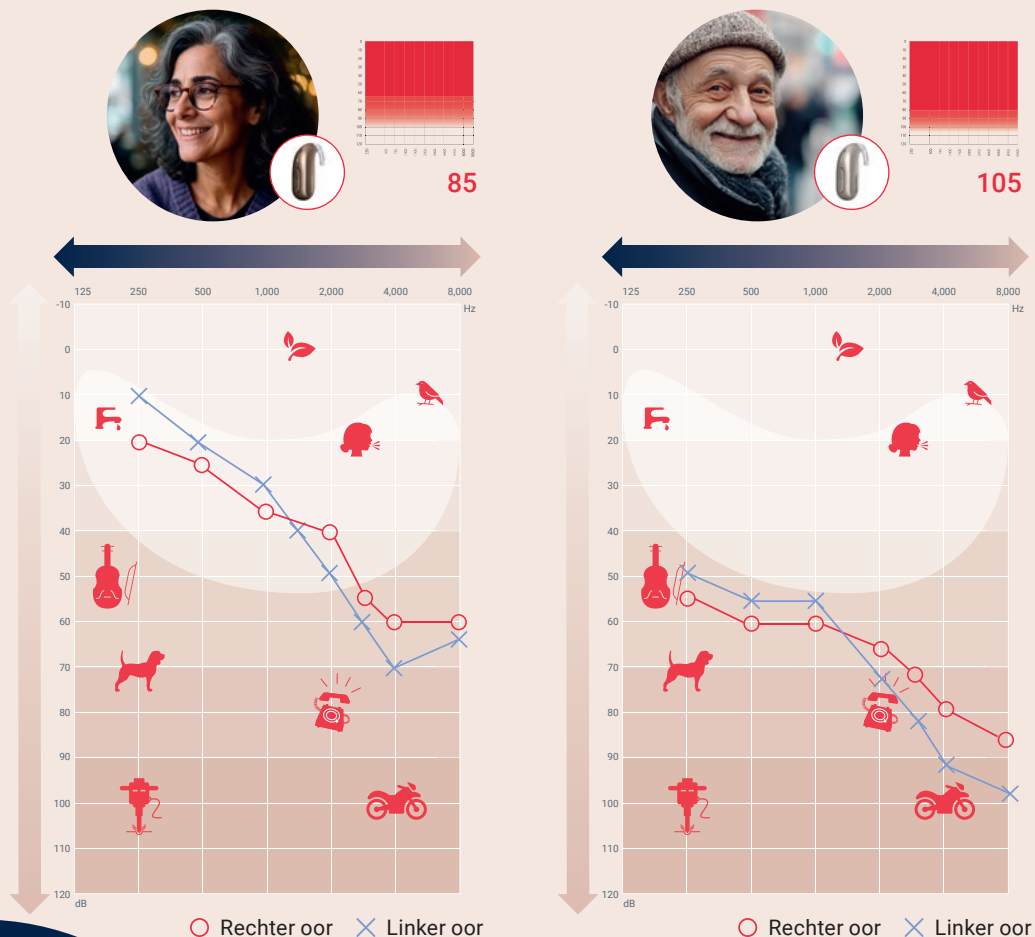

U kunt uw cliënten vertellen

Bernafon Encanta is er om aan uw behoeften te voldoen, zelfs als uw gehoorverlies in de loop der tijd verandert.


Onze beste technologie, nu in een miniBTE

De Bernafon Encanta familie groeit. Wanneer u uw cliënten een Encanta mini-BTE R geeft, krijgen ze het beste van Bernafon – inclusief onze meest geavanceerde geluidskwaliteit, connectiviteit en oplaadmogelijkheden. Alles in een compact, discreet ontwerp.

	Bernafon Geluidskwaliteit	Smart Noise Management	Smart Directionality	Smart Sensor	Uitgebreide bandbreedte
Encanta 400 Veel lawaai Groepsgesprek					
Encanta 300 Lawaaig Groepsgesprek					
Encanta 200 Lawaaig 1:1 gesprek					
Encanta 100 Weinig lawaai 1:1 gesprek					

Geef zelfvertrouwen met geavanceerde connectiviteit

Door uw cliënten verbonden te houden, voelen ze zich sterker. Bernafon Encanta biedt de nieuwste connectiviteit voor zowel iPhone- als Android™-gebruikers.

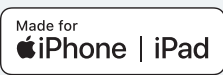Voor iPhone users	Voor Android users
 Bernafon Encanta is Made for iPhone en biedt naadloze tweerichtingsaudio voor handsfree bellen en directe streaming.*	 Bernafon Encanta is volledig compatibel met Bluetooth® LE Audio-telefoons*, wat zorgt voor betrouwbare tweerichtings-audiostreaming en handsfree communicatie, gecombineerd met een laag energieverbruik.**
	 Fast Pair Bernafon Encanta kan moeiteloos worden gekoppeld aan de Bluetooth LE Audio-telefoon van uw klant met Google Fast Pair.
 AURACAST A BLUETOOTH® TECHNOLOGY	Bernafon Encanta hoortoestellen zijn nu Auracast™-compatibel, waardoor uw cliënten via de Bernafon-app toegang hebben tot publieke uitzendingen.

Apple, het Apple-logo, iPhone en iPad zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Android™ is een handelsmerk van Google LLC. Het Bluetooth®-woordmerk en de logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. Het Auracast™-woordmerk en de logo's zijn handelsmerken van Bluetooth SIG. Elk gebruik van dergelijke merken door Demant is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. De Easy LE Adapter is geproduceerd door Minami Acoustics Limited.

* Ga voor informatie over compatibiliteit naar bernafon.com/compatibility


** In gevallen waarin de Android-telefoon van uw klant niet compatibel is met LE Audio, biedt de Easy LE Adapter nu alle voordelen van LE Audio. Klanten kunnen de Easy LE Adapter gebruiken met Android-telefoons, -tablets of -pc's met een USB-C-poort. De meeste telefoons en tablets met een 3,5mm-aansluiting werken echter niet met de adapter, omdat veel fabrikanten ervoor kiezen om de audio via de aansluiting te leiden in plaats van via de USB-C-poort.

Spraakverstaan voordelen

Bernafon Encanta miniBTE R is klinisch getest op een groep mensen met een ernstiger gehoorverlies. Hieruit is gebleken dat het toestel dezelfde geweldige voordelen op het gebied van spraakverstaan biedt als de Bernafon Encanta miniRITE, op alle vier de technologieniveaus.

Encanta 100 CONNECT

Spraak-in-stilte test

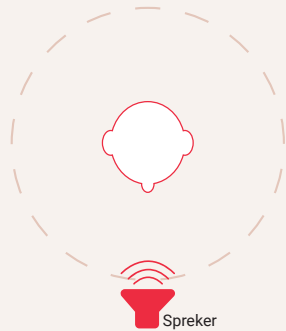


Encanta 100's Smart Amplification zorgt aantoonbaar voor

16.5 dB SPL
beter een-op-een
spraakverstaan in stilte¹

Encanta 200 GO

Spraak-in-lawaaai test

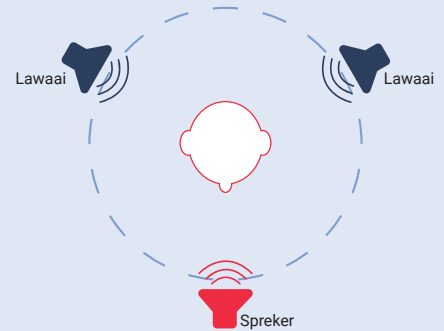

Encanta 200's Smart Noise Management zorgt aantoonbaar voor


2.1 dB SNR
beter een-op-een
spraakverstaan in lawaai²

Encanta 300 ENGAGE en Encanta 400 PRO

Meerdere luidsprekers spraak-in-lawaaai test

Encanta 300 & 400's Smart Noise Management met Smart Sensor technology zorgt aantoonbaar voor

tot 16%
beter een-op-een spraakverstaan
in een groep met mensen met lawaai³

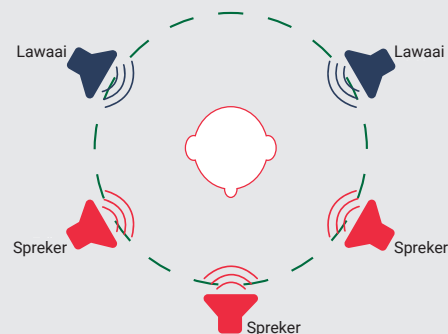

* Alle gegevens zijn verzameld in een klinische studie tussen april en mei 2025, waaraan 25 deelnemers deelnamen met een gemiddelde leeftijd van 66 jaar, een gemiddeld hoortoestelgebruik van 23 jaar en een gemiddelde symmetrische gehoordrempel van 58,37 dB HL (125 Hz-8 kHz). Alle gerapporteerde gegevens wijken significant af van hun respectievelijke referentiegegevens.

1 De vergelijking voor de spraakverstaanbaarheid van de Encanta 100 (16,5 dB SPL) is tussen de SRT50 met en zonder hoortoestel in stilte.

2 De vergelijking voor de spraakverstaanbaarheid van de Encanta 200 in lawaai (OLSA, 2,1 dB SNR) is tussen de SRT50 verkregen met en zonder lawaaiënderdrukking (NAL-NL2 versterkingsdoelen). 3 De vergelijking voor Encanta 200, 300 en 400 (CCOLSA, respectievelijk 6% en tot 16%) betreft de verstaanbaarheid verkregen met en zonder lawaaiënderdrukking (referentie Encanta 200 met NAL-NL2-versterkingsdoelen).

Design en duurzaamheid waarop u kunt vertrouwen

Onze kleinste miniBTE ooit met twee aanpasniveaus is ontworpen voor gebruiksgemak en betrouwbaarheid.



Bernafon Encanta miniBTE is verkrijgbaar in acht aantrekkelijke kleuren



Een oplossing voor nog meer behoeften

Bernafon Encanta heeft een portfolio van geavanceerde modellen, elk gemaakt voor optimale prestaties en comfort.

Unieke miniBTE met twee aanpasniveaus in één krachtig toestel



miniRITE R



Ultra discreet IIC

9 van de 10 IIC kandidaten krijgen een echt onzichtbare oplossing



CIC

De hele dag gemoedsrust

Onze betrouwbare en efficiënte laders geven uw cliënten een volledige dag stroom in slechts 60 minuten. Zelfs enkel 15 minuten opladen geeft ze al een boost van 4 uur.



2 uur – 100% opgeladen
60 minuten – 16 uur (hele dag stroom)
30 minuten – 8 uur
15 minuten – 4 uur

Feature overzicht

Bernafon Encanta miniRITE R en miniBTE R

Bernafon Encanta	Encanta 400 PRO	Encanta 300 ENGAGE	Encanta 200 GO	Encanta 100 CONNECT
Smart Amplification				
Aanpasbanden	24	20	18	14
Frequentiebandbreedte	80 Hz – 10 kHz	80 Hz – 8 kHz	80 Hz – 8 kHz	80 Hz – 8 kHz
Smart Noise Management				
Omni Directionality preference	Pinna Effect	Pinna Effect	Fixed Omni	Fixed Omni
Smart Directionality staat	Hoog (100% Effect)	Medium (80% Effect)	Laag (60% Effect)	-
Smart Noise Reduction	Heel hoog (tot 12 dB)	Hoog (tot 10 dB)	Medium (tot 8 dB)	Laag (tot 6 dB)
Machine Learning versie	2.0	2.0	2.0	2.0
Smart Sensor	✓	✓	-	-
Transient Noise Reduction	Maximum (tot 30 dB)	Heel hoog (tot 25 dB)	Hoog (tot 20 dB)	Medium (tot 15 dB)
Wind/Contact Noise Protector	✓	✓	✓	✓
Music Experience programma	✓	✓	✓	✓
Connectiviteit				
iPhone – tweewegs-audio en direct streaming	✓	✓	✓	✓
Android – direct audio streaming	✓	✓	✓	✓
Android-telefoons met Bluetooth LE Audio – tweewegs-audio, direct streaming, en hands-free communicatie	✓	✓	✓	✓
Tik controle voor beantwoorden telefoongesprekken	✓	✓	✓	✓
Bernafon App	✓	✓	✓	✓
Oplaadbaarheid – 100% opgeladen	2 uur	2 uur	2 uur	2 uur

ROOD geeft aan welke nieuwe functies er alleen beschikbaar zijn in Bernafon Encanta hoortoestellen

The Bernafon Sound Experience

Bij Bernafon is het aan ons om het werk van professionals te ondersteunen. Om hen te helpen uitstekende zorg te leveren, zoals zij dat willen. Omdat we weten dat expertise belangrijk is.

Professionele zorg is de sleutel die geweldige technologie verandert naar persoonlijke oplossingen. Oplossingen die mensen met gehoorverlies helpen om hun leven te leiden zoals zij dat willen. Als onderdeel van de Demant Group, met meer dan 100 jaar ervaring en kennis, profiteert Bernafon van een van de beste onderzoeksteams ter wereld op het gebied van hoorzorg. Wij brengen deze expertise en toewijding naar professionals – zodat zij een geweldige geluidservaring kunnen bieden.

Ga naar onze Bernafon website voor informatie over onze hoortoestellen.

Hoofdkantoor

Bernafon
Kongebakken 9
2765 Smørum
Denemarken

Afbeeldingen: Artificial intelligence (AI)-programma's zijn gebruikt om enkele van de afbeeldingen te maken

Bernafon kantoren

Australië • België • Brazilië • Canada • China • Denemarken • Finland • Frankrijk • Duitsland • Italië • Japan • Korea • Nederland • Nieuw Zeeland • Polen • Zuid-Afrika • Spanje • Zweden • Zwitserland • Turkije • Verenigd Koninkrijk • Amerika



YouTube

www.bernafon.nl

Bernafon

THE SOUND EXPERIENCE