

Gebruiksaanwijzing

miniRITE R

Oticon Opn S™
Oticon Opn Play™



Made for
iPhone | iPad | iPod

oticon
PEOPLE FIRST

Modellenoverzicht

Dit boekje is van toepassing op de volgende hoortoestelmodellen uit de Oticon Opn S™ en Oticon Opn Play™ families:

- Oticon Opn S 1 miniRITE R
- Oticon Opn S 2 miniRITE R
- Oticon Opn S 3 miniRITE R
- Oticon Opn Play 1 miniRITE R
- Oticon Opn Play 2 miniRITE R

De volgende luidsprekers zijn beschikbaar voor de bovenstaande modellen:

- Luidspreker 60
- Luidspreker 85
- Luidspreker 100 (Power toestel)
- Power FlexMoulds luidspreker 100 (Power toestel)
- Power FlexMoulds luidspreker 105 (Power toestel)

Inleiding

In dit boekje vindt u informatie over het gebruik en het onderhoud van uw nieuwe hoortoestel. Lees dit boekje aandachtig door en vergeet daarbij het hoofdstuk **Waarschuwingen** niet. Lees dit boekje aandacht door, inclusief het hoofdstuk **Waarschuwingen**.

Uw hoorzorg professional heeft het hoortoestel zodanig ingesteld dat het aan uw behoeften voldoet. Uw hoorzorg professional heeft het hoortoestel zodanig ingesteld dat het aan uw behoeften voldoet.

[Over](#) | [Aan de slag](#) | [Gebruik](#) | [Opties](#) | [Tinnitus](#) | [Waarschuwingen](#) | [Aanvullende informatie](#) |

Voor uw gemak is dit boekje voorzien van een navigatiebalk, zodat u gemakkelijk door de verschillende hoofdstukken kunt navigeren.

Beoogd gebruik

De hoortoestellen zijn bedoeld voor het versterken en overbrengen van geluid naar het oor en compenseren daarmee slechthorendheid voor een licht tot ernstig/zwaar gehoorverlies. Dit hoortoestel is bedoeld voor volwassenen en kinderen ouder dan 36 maanden.

BELANGRIJKE OPMERKING

Tijdens de aanpassing van uw hoorzorg professional is de hoortoestelversterking uniek aangepast en geoptimaliseerd voor uw gehoor.

Kortom

Opladen

Laad het hoortoestel elke nacht op.

De LED op het hoortoestel wordt ROOD wanneer het hoortoestel wordt opgeladen en GROEN wanneer de batterij volledig is opgeladen.

Het duurt 3 uur om een hoortoestel volledig op te laden.

AAN/UIT

Het hoortoestel gaat AAN wanneer u het uit de oplader verwijdert. Het hoortoestel gaat UIT wanneer u het in de oplader plaatst.

Laat de oplader altijd aangesloten op een stroombron wanneer het hoortoestel zich in de oplaadpoort bevindt. Wanneer de oplader wordt uitgeschakeld, wordt het hoortoestel ingeschakeld en verbruikt het batterij.

Inhoudsopgave

Over

Uw hoortoestel, luidspreker en oorstukje	10
Hoortoestel	12
Charger	13

Aan de slag

Oplader voorbereiden	14
Hoortoestellen opladen	15
Oplaadtijd	16
Batterijprestatie	17
Het hoortoestel AAN/UITzetten met de oplader	18
Het hoortoestel AAN/UITzetten met de druktoets	19
Indicatie lage batterijspanning	20
Nagaan wat het linker- en rechertoestel is	21
Het hoortoestel indoen	22

Inhoudsopgave

Gebruik

Schoonmaken	24
Standaard oorstukjes vervangen	26
ProWax miniFit filter	28
Aangepaste oorstukjes schoonmaken	30
ProWax filter vervangen	31
Opslag van het hoortoestel	32
Vliegtuigmodus	34

Opties

Optionele functies en accessoires	36
Volume wijzigen	37
Programma veranderen	38
Dempen	40
Hoortoestellen gebruiken met iPhone en iPad	41
Draadloze accessoires en andere opties	44
Geluids- en LEDindicaties	46

Tinnitus

Tinnitus SoundSupport™ (optioneel)	50
Geluid- en volumeregeling	52
Beperking gebruiksduur	55


Waarschuwingen

Tinnitus SoundSupport waarschuwingen	58
Algemene waarschuwingen	60

Aanvullende informatie


Problemen oplossen	66
Water- en stofbestendig (IP68)	70
Hoortoestel: Gebruiksomstandigheden	71
Garantie	72
Technische informatie	74
Uw individuele hoortoestelinstellingen	80

Uw hoortoestel, luidspreker en oorstukje

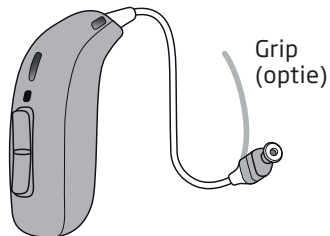


De hoortoestellen maken gebruik van een van de volgende luidsprekers:

Standaard luidsprekers

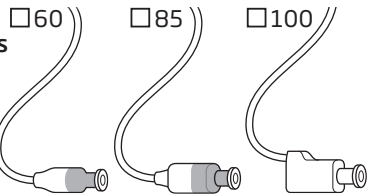

Power FlexMould luidsprekers

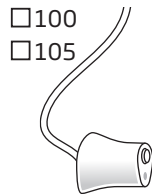

De standaard luidsprekers maken gebruik van een van de volgende oorstukjes:

Standaardoorstukjes:

- Open dome
- Bass dome, enkele venting
- Bass dome, dubbele venting
- Power dome
- GripTip

Verkrijgbaar in small en large, links en rechts, met en zonder venting.

Dome maten



5 mm* 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm**
* alleen als open dome voor luidspreker 60
** niet voor open dome

Custom oorstukjes:


- MicroMould
- LiteTip
- VarioTherm® MicroMould
- VarioTherm® LiteTip

® VarioTherm is een geregistreerd handelsmerk van Dreve

Ga voor meer details over het vervangen van de dome naar de paragraaf "De dome of GripTip vervangen"


Hoortoestel

Wat is het en wat doet het

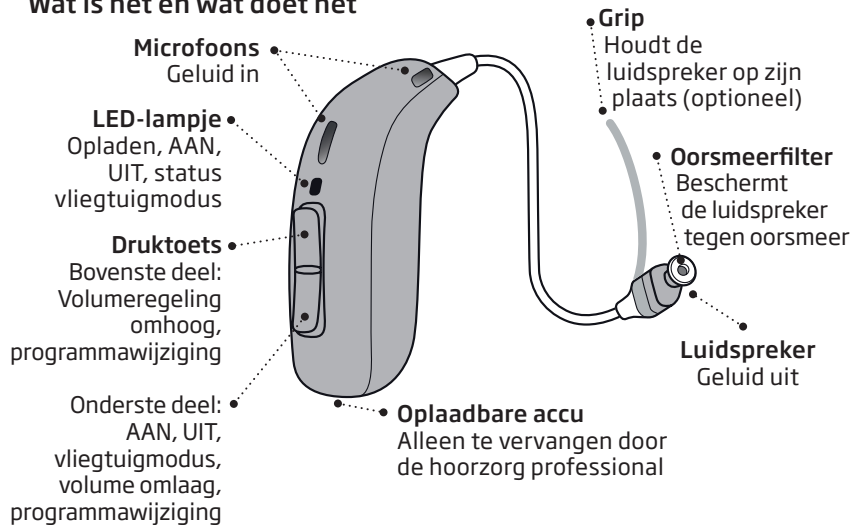

Charger


Wat is het en wat doet het

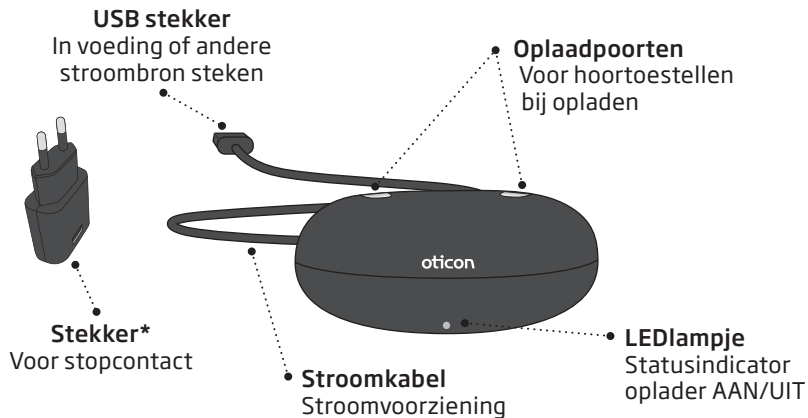

* De stekker verschilt van land tot land

Oplader voorbereiden


Aansluiten op stroombron

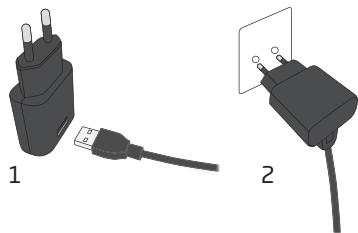

1. Steek de USB stekker in de stekker.
2. Steek de stekker in een stopcontact.

De oplader wordt automatisch ingeschakeld.


Oplader is aan

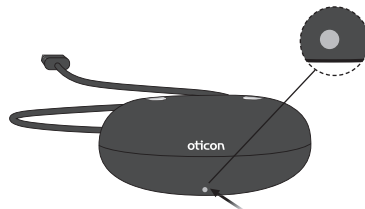

Wanneer de oplader is aangesloten op stroom, gaat de groene LED aan.


Hoortoestellen opladen

Hoortoestellen in de oplader plaatsen

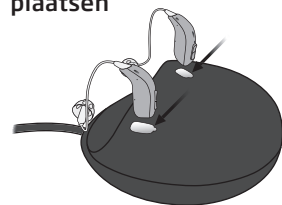

Plaats de hoortoestellen in de oplaadpoorten zoals is weergegeven in de afbeelding.

Opladen

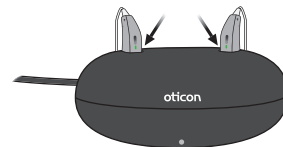

De LED's van de hoortoestellen gaan aan wanneer de hoortoestellen juist in de oplader zijn geplaatst.

Oplaadstatus LED van het hoortoestel:

Rood = opladen
Groen = volledig opgeladen

Oplaadtijd

Laad uw hoortoestel volledig op voor het eerste gebruik.

Laad uw hoortoestel elke nacht op. Dat zorgt ervoor dat u uw dag kunt beginnen met een volledig opgeladen hoortoestel.

De oplaadtijd kan verschillen afhankelijk van de resterende capaciteit van de batterij. Als uw hoortoestel volledig leeg is, is de gewoonlijke oplaadtijd:

3 uur	1 uur	0,5 uur
Volledig opgeladen	50% opgeladen	25 % opgeladen

Het oplaadproces stopt automatisch wanneer de batterij volledig is opgeladen. Laat het hoortoestel in de oplader als u het niet gebruikt. Denk eraan de oplader aangesloten te houden op een stroombron.

NB: de oplaadtijd tussen het linker en het rechter hoortoestel kan verschillen .

Batterijprestatie

De dagelijkse batterijprestatie varieert afhankelijk van uw individueel gebruik en de instellingen van het hoortoestel.

Het streamen van geluid van bijvoorbeeld de televisie, mobiele telefoon of ConnectClip kan van invloed zijn op de dagelijkse batterijprestatie.

Als de batterij van uw hoortoestel leeg raakt, plaatst u het in de oplader om opnieuw op te laden. Het opnieuw starten van het hoortoestel heeft niet tot gevolg dat er extra gebruikstijd kan worden verkregen.

De kamertemperatuur dient tussen de +5°C en +35°C te liggen voor de beste oplaadomstandigheden.

Als u merkt dat de batterij van uw hoortoestel niet meer een hele dag meegaat, dan is het waarschijnlijk tijd om de batterij te vervangen. Neem contact op met uw hoorzorg professional.

Het hoortoestel AAN/UITzetten met de oplader

Uw hoortoestel wordt automatisch **AAN**gezet wanneer het uit de oplader wordt gehaald.

De LED van het hoortoestel gaat na 6 seconden **GROEN** branden om te bevestigen dat het gereed is voor gebruik. U kunt een startmelodietje horen.


Uw hoortoestel wordt automatisch **UIT**gezet wanneer het in de oplader wordt geplaatst en begint met opladen. De LED gaat **ROOD** branden.

BELANGRIJKE OPMERKING

Laad de oplader altijd aangesloten op een stroombron wanneer het hoortoestel zich in de oplaadpoort bevindt. Wanneer de oplader wordt uitgeschakeld, wordt het hoortoestel ingeschakeld en verbruikt het batterij.

Het hoortoestel AAN/UITzetten met de druktoets

Het hoortoestel kan AAN en UIT worden gezet met de druktoets.

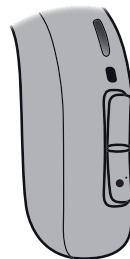

AAN:

Houd het onderste deel van de druktoets ongeveer 2 seconden ingedrukt. Laat de toets los en wacht tot de LED van het hoortoestel GROEN wordt. Het hoortoestel staat nu AAN. U kunt een kort startmelodietje horen.

UIT:

Houd het onderste deel van de druktoets ongeveer 3 seconden ingedrukt totdat de LED van het hoortoestel ROOD wordt en het hoortoestel 4 dalende piepjes afspeelt. Laat de druktoets los en het hoortoestel wordt UITgezet.

Zie overzicht "Geluids- en LEDindicaties".

Indicatie lage batterijspanning

Wanneer de batterij bijna leeg is, hoort u drie korte piepjes. U heeft nu nog ongeveer twee uur totdat het hoortoestel stopt met werken. De piepjes worden om de 30 minuten herhaald. Net voordat de batterij leeg is, hoort u vier dalende piepjes.

Als u audio streamt van uw hoortoestel (van bijv. de televisie of mobiele telefoon) heeft u, wanneer u de drie piepjes hoort, nog ongeveer één uur voordat het hoortoestel stopt met werken. Als u stopt met streamen zal dit de batterijprestatie verlengen.



Drie piepjes
= de batterij is bijna leeg



Vier dalende piepjes
= de batterij is leeg


Optionele LED

Rood knipperend, continu herhaald, om batterij bijna leeg aan te geven.

Nagaan wat het linker- en rechertoestel is

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen het linker- en rechertoestel omdat ze mogelijk verschillend geprogrammeerd zijn.

Er bevinden zich links/rechts kleurmarkeringen op het hoortoestel zelf en op de 60- en 85-luidsprekers zoals aangegeven. Markeringen (L of R) kunnen ook worden gevonden op de 100-luidsprekers en op sommige oorstukjes.

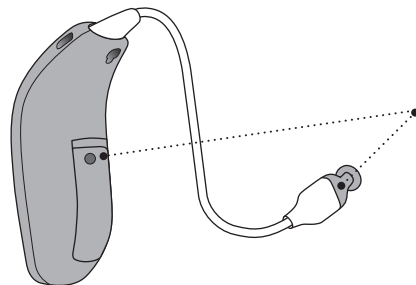

Een **RODE** stip markeert het RECHTER-toestel.

Een **BLAUWE** stip markeert het LINKER-toestel.

Het hoortoestel indoen


Stap 1



Plaats het hoortoestel achter uw oor.


De luidspreker moet altijd in combinatie met een oorstukje worden gebruikt. Gebruik alleen onderdelen die specifiek bestemd zijn voor uw hoortoestel.

Stap 2

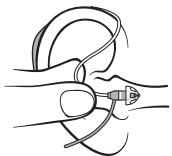

Houd de bocht van het luidsprekersnoer tussen uw duim en wijsvinger. Het oorstukje moet richting de opening van de gehoorgang wijzen.

Stap 3

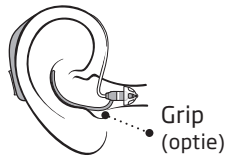


Druk het oorstukje voorzichtig in de gehoorgang tot het luidsprekersnoer dicht tegen uw hoofd zit.

Als de luidspreker een grip heeft, plaats deze dan in het oor zodat het de ronding van het oor volgt.

Schoonmaken

De MultiTool is ook voorzien van een borstel en een draadlus voor het schoonmaken en om oorsmeer te verwijderen. Als u een nieuwe MultiTool nodig heeft, neem dan contact op met uw hoorzorg professional.

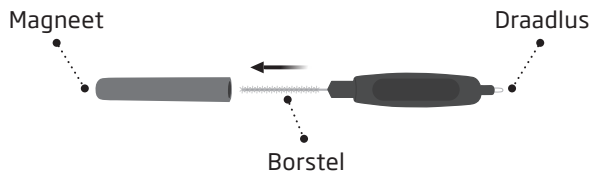


BELANGRIJKE OPMERKING

De meegeleverde MultiTool heeft een ingebouwde magneet. Houd de MultiTool 30 cm verwijderd van creditcards en andere magnetisch gevoelige voorwerpen.

Houd uw hoortoestel tijdens het schoonmaken boven een zachte ondergrond, zodat het niet beschadigd raakt als u het laat vallen.

De microfoonopeningen schoonmaken

Borstel voorzichtig eventueel vuil weg uit de openingen. Borstel voorzichtig het oppervlak schoon. Zorg ervoor dat de borsteltje schoon is en dat hij niet in de openingen wordt geduwd.

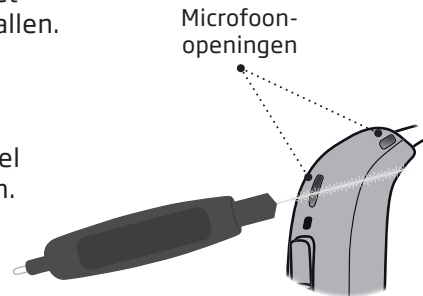


BELANGRIJKE OPMERKING

Gebruik een zachte, droge doek voor het schoonmaken van het hoortoestel. Het hoortoestel mag nooit ondergedompeld worden in water of andere vloeistoffen.

Standaard oorstukjes vervangen


Het standaard oorstukje (dome en GripTip) mag niet gereinigd worden. Wanneer het vol zit met oorsmeer, dient het te worden vervangen door een nieuwe. Wij raden aan de GripTip minimaal een keer per maand te vervangen.

Stap 1

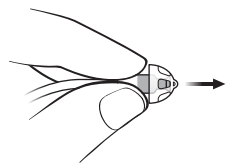


Houd de luidspreker vast en trek het oorstukje eraf.

Stap 2

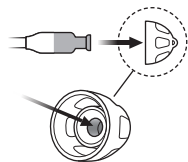

Plaats de luidspreker precies in het midden van de dome of GripTip voor een stevige bevestiging.

Stap 3

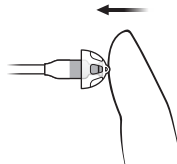

Druk hem goed aan om ervoor te zorgen dat het oorstukje stevig vast zit.


BELANGRIJKE OPMERKING

Als het oorstukje niet op de luidspreker zit wanneer deze uit het oor wordt verwijderd, kan het zijn dat het oorstukje in de gehoorgang is achtergebleven. Raadpleeg dan uw hoorzorg professional voor nadere instructies.

ProWax miniFit filter

Aan het uiteinde van de luidspreker zit een wit oorsmeerfilter waar het oorstukje is bevestigd. De oorsmeerfilter voorkomt dat oorsmeer en vuil de luidspreker beschadigen. Vervang de filter als het verstopt is of als het hoortoestel niet normaal klinkt. Neem anders contact op met uw hoorzorg professional.

Verwijder het oorstukje van de luidspreker voordat u de oorsmeerfilter vervangt.

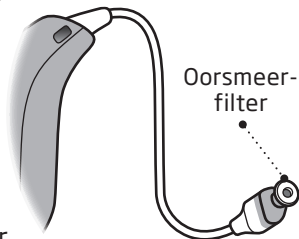


BELANGRIJKE OPMERKING

Gebruik altijd hetzelfde type oorsmeerfilter als degene die origineel bij het toestel wordt geleverd. Als u twijfelt over het gebruiken of vervangen van uw oorsmeerfilter, neemt u dan contact op met uw hoorzorg professional.


ProWax miniFit filter vervangen

1. Tool

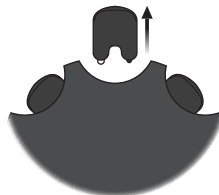


Verwijder de tool uit de behuizing. De tool heeft twee pinnetjes, één lege voor het verwijderen van het filter en één met het nieuwe oorsmeerfilter.

2. Oude filter verwijderen

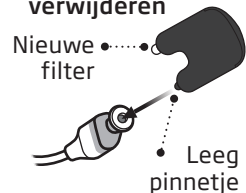

Duw het lege pinnetje in het oorsmeerfilter in de luidspreker van het toestel en trek het eruit.

3. Nieuwe filter plaatsen

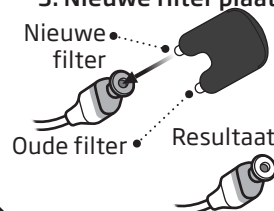

Plaats de nieuwe oorsmeerfilter met behulp van het andere pinnetje, verwijder de tool en werp deze weg.

Opmerking:


Als u een oorstukje of LiteTip gebruikt, dient uw hoorzorg professional de oorsmeerfilter in de luidspreker te vervangen.

Aangepaste oorstukjes schoonmaken

Het oorstukje dient regelmatig te worden schoongemaakt.

Het oorstukje heeft een wit oorsmeerfilter*. De filter voorkomt dat oorsmeer en vuil de luidspreker beschadigen.


Vervang de filter als het verstopt is of als het hoortoestel niet normaal klinkt. Neem anders contact op met uw hoorzorg professional.

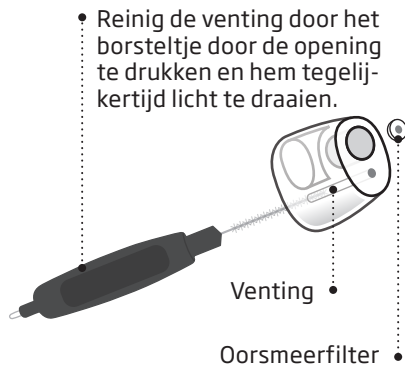

* VarioTherm MicroMould en LiteTip hebben geen oorsmeerfilter


ProWax filter vervangen

1. Tool

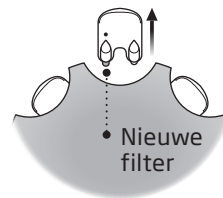


Verwijder de tool uit de behuizing. De tool heeft twee pinnetjes, één lege voor het verwijderen van de filter en één met de nieuwe oorsmeerfilter.

2. Oude filter verwijderen

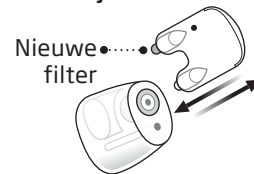

Duw het lege pinnetje in de oorsmeerfilter in het oorstukje en trek het eruit.

3. Nieuwe filter plaatsen

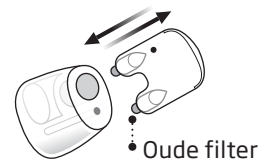

Plaats de nieuwe oorsmeerfilter met behulp van het andere pinnetje, verwijder de tool en werp deze weg.

Opslag van het hoortoestel

U kunt uw hoortoestel het beste op de oplader bewaren. Wanneer u het hoortoestel niet gebruikt, plaatst u het op de oplader om op te laden. Dit zorgt ervoor dat uw hoortoestel altijd opgeladen is.

Om ervoor te zorgen dat de oplaadbare batterij zo lang mogelijk meegaat, mag u het hoortoestel niet blootstellen aan overmatige hitte. Laat het hoortoestel bijvoorbeeld niet in de zon bij een raam of in een auto liggen, zelfs wanneer het hoortoestel zich in de oplader bevindt.

BELANGRIJKE OPMERKING

Laat de oplader altijd aangesloten op een stroombron wanneer het hoortoestel zich in de oplaadpoort bevindt. Wanneer de oplader wordt uitgeschakeld, wordt het hoortoestel ingeschakeld en verbruikt het batterij.


Langetermijnopslag (weken, maanden)

Laad het hoortoestel volledig op voordat u het gedurende langere tijd opslaat (meer dan 14 dagen). Zet het hoortoestel vervolgens uit. Op deze manier kan de batterij weer worden opgeladen.

Om de oplaadbare batterij te beschermen moet het hoortoestel om de 6 maanden volledig worden opgeladen. Als een opgeslagen hoortoestel niet binnen een tijdsduur van 6 maanden wordt opgeladen, moet de oplaadbare batterij worden vervangen.

Vliegtuigmodus

Om de vliegtuigmodus te activeren en deactiveren houdt u de druktoets (onderste deel) gedurende 7 seconden ingedrukt.

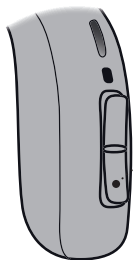

Piepen: Het hoortoestel speelt 4 aflopende piepjes af gevolgd door 4 piepjes. Dit geeft aan dat de vliegtuigmodus is geactiveerd of gedeactiveerd.

LED vliegtuigmodus geactiveerd: Lang rood knipperen gevolgd door groen, rood, rood. De LED knippert enkele keren groen, rood, rood. Dit bevestigt dat de vliegtuigmodus is geactiveerd.

LED vliegtuigmodus gedeactiveerd: Lang rood knipperen gevolgd door twee keer lang groen knipperen. Dit bevestigt dat de vliegtuigmodus is gedeactiveerd.

Als u op de toets op één hoortoestel drukt, wordt de vliegtuigmodus in beide hoortoestellen geactiveerd.

Wanneer de vliegtuigmodus is geactiveerd, staat Bluetooth® uit. Het hoortoestel blijft gewoon werken.

Zie overzicht "Geluids- en LEDindicaties".

Optionele functies en accessoires

De functies en accessoires die op de volgende pagina's worden beschreven, zijn optioneel. Neem contact op met uw hoorzorg professional om erachter te komen hoe uw hoortoestel is geprogrammeerd.

Als u te maken heeft met moeilijke luistersituaties kan een speciaal programma nuttig zijn. Deze worden door uw hoorzorg professional geprogrammeerd.

Noteer luistersituaties waarbij u hulp nodig heeft.

Volume wijzigen

Met behulp van de druktoets kunt u het volume aanpassen. U hoort een piepje als u het volume verhoogt of verlaagt.



In te vullen door de hoorzorg professional

Aanpassen van het volume


LINKS

RECHTS

Kort drukken

□ Programma wijzigen

Uw hoortoestel heeft maximaal 4 verschillende programma's. Deze worden door uw hoorzorg professional geprogrammeerd.

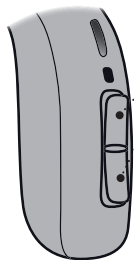

Druk op omhoog of omlaag om tussen programma's te schakelen.

Let op: u kunt continu tussen programma's schakelen - zowel via de omhoog-toets als via de omlaag-toets in de volgorde van de ingestelde programma's. Als u bijvoorbeeld van programma 1 naar programma 4 wilt wisselen, dan kunt u op de omlaag-toets drukken in plaats van 3 keer op de omhoog-toets te drukken.

In te vullen door de hoorzorg professional

Programma	Geluidsactivering	Wanneer te gebruiken
1	♪ "1 piepje"	
2	♪♪ "2 piepjes"	
3	♪♪♪ "3 piepjes"	
4	♪♪♪♪ "4 piepjes"	

Programma wijzigen	<input type="checkbox"/> LINKS	<input type="checkbox"/> RECHTS	<input type="checkbox"/> Kort drukken	<input type="checkbox"/> Lang drukken
--------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Dempen

U kunt de dempfunctie gebruiken om het hoortoestel uit te zetten. Uw hoortoestel kan worden gedempt met één van de volgende optionele apparaten:

Oticon ON app
ConnectClip
Afstandsbediening 3.0

Dempen van uw hoortoestellen opheffen

De demping van uw hoortoestel kan worden opgeheven met één van de volgende optionele apparaten of door kort te drukken op het bovenste of onderste deel van de toets op het hoortoestel.

BELANGRIJKE OPMERKING

Gebruik de dempfunctie niet om het hoortoestel uit te zetten; het gebruikt dan nog steeds stroom.

Hoortoestellen gebruiken met iPhone en iPad

Uw hoortoestellen zijn Made for iPhone® en kunnen rechtstreeks communiceren en worden bediend met een iPhone, iPad® of iPod touch®. Voor assistentie bij het gebruik van deze producten met uw hoortoestel kunt u contact opnemen met uw hoorzorg professional of onze website bezoeken: www.oticon.nl/connectivity



Ga voor meer informatie over compatibiliteit naar www.oticon.nl/compatibility


De Made for Apple badge betekent dat een accessoire is ontworpen om specifiek verbinding te maken met de op de badge aangegeven Apple producten en volgens de ontwikkelaar voldoet aan Apple prestatienormen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of het beantwoorden ervan aan de veiligheidsnormen en voorschriften.

Merk op dat door gebruik van deze accessoire met iPod, iPhone, of iPad de draadloze prestaties kunnen afnemen.

Apple, het Apple logo, iPhone, iPad, en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen.


Koppelen met iPhone

1. Instellingen

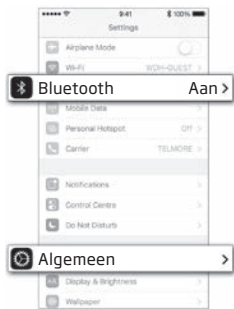


Ga op uw iPhone naar "Instellingen". Zorg ervoor dat Bluetooth aanstaat. Kies vervolgens "Algemeen".

2. Algemeen

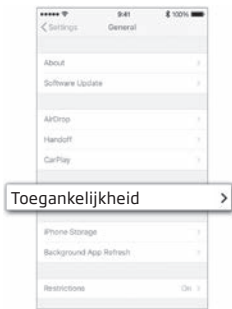

Op het scherm "Algemeen" kiest u voor Toegankelijkheid.

3. Toegankelijkheid

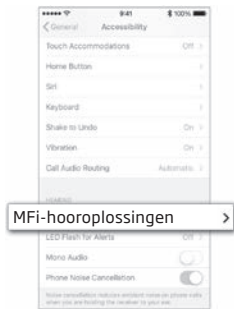

Kies "MFi-hoortoestellen" in het scherm "Toegankelijkheid".

4. Voorbereiden

Koppelen moet worden uitgevoerd binnen 3 minuten na het aanzetten van hoortoestel.

Start het hoortoestel opnieuw: Plaats het in de oplader of verwijder het opnieuw, of gebruik de druktoets (zie paragraaf: Het hoortoestel AAN/UITzetten met de druktoets).

Dit zal de hoortoestellen in koppelsstand zetten.


Als u uw hoortoestellen of Apple® apparaat uitzet, zijn ze niet langer met elkaar verbonden. Om ze opnieuw te verbinden, start u uw hoortoestellen opnieuw. De hoortoestellen zullen dan automatisch opnieuw verbinding maken met uw Apple apparaat.

5. Selecteren



Uw iPhone zal het hoortoestel detecteren voor koppeling. Gedetecteerde apparaten verschijnen in uw iPhone lijst. Kies uw hoortoestel.

6. Bevestig de koppeling

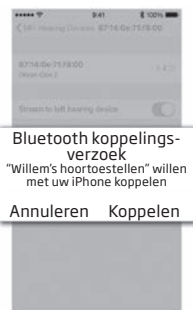

Bevestig koppeling. Als u twee hoortoestellen heeft, is koppelingsbevestiging voor beide hoortoestellen nodig.

Draadloze accessoires en andere opties

Als aanvulling op uw draadloze hoortoestel is een reeks accessoires verkrijgbaar. Deze kunnen u helpen beter te horen en communiceren in vele alledaagse situaties.

ConnectClip

Als ConnectClip met uw mobiele telefoon is gekoppeld, kunt u de hoortoestellen gebruiken als een handsfree headset of externe microfoon.

TV Adapter 3.0

Draadloze zender van geluid van televisies en elektronische audio-apparaten. TV Adapter streamt geluid rechtstreeks naar uw hoortoestel.

Afstandsbediening 3.0

Biedt de mogelijkheid om het programma te wijzigen, het volume aan te passen of uw hoortoestel te dempen.

Oticon ON App

Biedt een intuïtieve, eenvoudige en discrete manier om uw hoortoestel te bedienen. Voor iPhone, iPad, iPod touch en Android™ apparaten.

Phone Adapter 2.0

Telefoonadapter 2.0 verbindt draadloos met de ConnectClip voor probleemloos dagelijks gebruik van traditionele telefoons.

Ga voor meer informatie naar: <http://www.oticon.nl/connectivity>

Luisterspoelprogramma

Met een luisterspoel kunt u beter horen als u een telefoon met ingebouwde ringleiding gebruikt of wanneer u in een gebouw met een

ringleidingsysteem bent, zoals een schouwburg, kerk of collegezaal. Dit symbool of een vergelijkbaar teken wordt weergegeven op plaatsen waar een ringleidingsysteem aanwezig is.



Neem voor meer informatie contact op met uw hoorzorg professional.

Geluids- en LEDindicaties

Er zijn verschillende geluids- en LEDindicaties om u de status van de hoortoestellen te laten zien. Op de volgende pagina's worden de verschillende opties vermeld.







Uw hoorzorg professional kan de geluids- en LEDindicaties afstemmen op uw voorkeuren.





Voor de LEDindicaties van de oplader, zie Gebruiksaanwijzing voor de oplader.




Programmastatus	<input type="checkbox"/> Geluid	<input type="checkbox"/> LED	LED opmerkingen
Programma 1	1 piepje		Continu herhaald of 3 keer herhaald met kleine pauzes
Programma 2	2 piepjes		
Programma 3	3 piepjes		
Programma 4	4 piepjes		
Draadloze accessoires inclusief microfoon	2 piepjes		
Draadloze accessoires	2 piepjes		
Vliegtuigmodus	Geluid	<input type="checkbox"/> LED	
Vliegtuigmodus actief	4 plus 4 piepjes		
Vliegtuigmodus niet actief	4 plus 4 piepjes		

Groen, kort knipperen Groen, lang knipperen Rood, kort knipperen

Rood, lang knipperen

Aan/Uit	Geluid	LED	LED opmerkingen
Aan	<input type="checkbox"/> Startmelodietje	<input type="checkbox"/> 	Toon een keer
Uit	<input type="checkbox"/> 4 dalende piepjes	<input type="checkbox"/> 	
Volume	Geluid	LED	
Gewenst volume	<input type="checkbox"/> 2 piepjes	<input type="checkbox"/> 	Toon een keer
Minimum / maximum volume	<input type="checkbox"/> 3 piepjes	<input type="checkbox"/> 	
Volume hoger/lager	<input type="checkbox"/> 1 piepje	<input type="checkbox"/> 	
Dempen geactiveerd op ON App, ConnectClip of Remote Control 3.0		<input type="checkbox"/> 	Drie keer herhaald

 Groen, kort knipperen
  Groen, lang knipperen
  Rood, kort knipperen
  Rood, lang knipperen

Waarschuwingen	Geluid	LED	LED opmerkingen
Indicatie lage batterijspanning	<input type="checkbox"/> 3 piepjes	<input type="checkbox"/> 	Continu herhaald
Batterij leeg	<input type="checkbox"/> 4 dalende piepjes		
Microfoon onderhoudscontrole vereist	<input type="checkbox"/> 8 piepjes 4 keer herhaald	<input type="checkbox"/> 	4 keer herhaald met kleine pauzes
Geen lampje op het hoortoestel LED wanneer in de oplader geplaatst		Uitgeschakeld	Zie problemen oplossen, oplossingen
De LED van het hoortoestel knippert rood wanneer het toestel in de oplader wordt geplaatst			Continu herhaald. Zie problemen oplossen, oplossingen

 Rood, kort knipperen
  Rood, lang knipperen

Tinnitus SoundSupport™ (optioneel)

Beoogd gebruik van Tinnitus SoundSupport

Tinnitus SoundSupport is een tool die geluiden genereert om tijdelijk verlichting te brengen aan mensen die lijden aan tinnitus, als onderdeel van een tinnitusbehandelprogramma.

Het is bedoeld voor volwassenen (18 jaar of ouder).

Tinnitus SoundSupport is bestemd voor erkende hoorzorg professionals (audiologen, hoortoestelspecialisten of KNO-artsen) die bekend zijn met het beoordelen en behandelen van tinnitus en gehoorverlies. De aanpassing van Tinnitus SoundSupport dient te worden uitgevoerd door een hoorzorg professional als onderdeel van een tinnitusbehandelprogramma.

Richtlijnen voor gebruikers van de tinnitusgeluidsgenerator

Deze instructies bevatten informatie over Tinnitus SoundSupport. Uw hoorzorg professional kan dit geactiveerd hebben in uw hoortoestellen.

Tinnitus SoundSupport is een tinnitus management apparaat dat bedoeld is om geluid van voldoende intensiteit en bandbreedte te genereren om te helpen tinnitus beheersbaar te maken. Uw hoorzorg professional kan u ook de juiste nazorg bieden. Het is belangrijk dat u het advies en de aanwijzingen voor wat betreft deze nazorg opvolgt.

Uitsluitend voor gebruik op voorschrift

Een persoon die meldt last te hebben van tinnitus dient volgens goed gebruik in de gezondheidszorg vóór het gebruik van een geluidsgenerator een medische beoordeling door een erkende oorarts te ondergaan. Deze beoordeling heeft tot doel om er zeker van te zijn dat alle medisch behandelbare klachten die tinnitus kunnen veroorzaken, onderkend en behandeld zijn vóór het gebruik van de geluidsgenerator.

Geluids- en volumeregeling

Tinnitus SoundSupport wordt door uw hoorzorg professional geprogrammeerd overeenkomstig uw gehoorverlies en voorkeuren voor tinnitusverlichting. Het heeft een aantal verschillende geluidsopties. Samen met uw hoorzorg professional kunt u uw voorkeursgeluid(en) selecteren.

Tinnitus SoundSupport programma's

Samen met uw hoorzorg professional beslist u in welke programma's u Tinnitus SoundSupport geactiveerd wilt hebben. De geluidsgenerator kan in maximaal vier verschillende programma's worden geactiveerd.

Volumeregeling met Tinnitus SoundSupport

Als u een hoortoestelprogramma selecteert waarvoor Tinnitus SoundSupport geactiveerd is, kan uw hoorzorg professional alleen de druktoets op uw hoortoestel instellen om te functioneren als volumeregeling voor het verlichtende tinnitusgeluid.

Uw hoorzorg professional kan de volumeregeling voor de geluidsgenerator op twee manieren instellen:

- A) Het volume voor ieder oor afzonderlijk aanpassen, of
- B) Het volume voor beide oren tegelijk aanpassen.

miniRITE R

<input type="checkbox"/>	<p>A) Het volume van Tinnitus SoundSupport in ieder oor afzonderlijk aanpassen</p> <p>Om het geluidsvolume te verhogen (op slechts één hoortoestel), druk herhaaldelijk kort op het bovenste gedeelte van de druktoets tot het gewenste niveau is bereikt.</p> <p>Druk om het volume (op slechts één hoortoestel) te verlagen herhaaldelijk kort op het onderste deel van de drukknop totdat het gewenste niveau is bereikt.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>B) Het volume van Tinnitus SoundSupport in beide oren tegelijkertijd aanpassen</p> <p>U kunt één hoortoestel gebruiken om het geluid in beide hoortoestellen harder of zachter te zetten. Als u het volume in één hoortoestel wijzigt, zal het volume van het andere hoortoestel volgen.</p> <p>Om het volume te verhogen drukt u kort op het bovenste deel van de druktoets.</p> <p>Om het volume te verlagen drukt u kort op het onderste deel van de druktoets.</p>

In te vullen door uw hoorzorg professional.

Beperking gebruiksduur

Dagelijks gebruik

Het volumeniveau van Tinnitus SoundSupport kan ingesteld worden op een niveau dat tot permanente gehoorbeschadiging kan leiden als het voor langere tijd wordt gebruikt. Uw hoorzorg professional zal u adviseren over de maximale tijd per dag dat u Tinnitus SoundSupport dient te gebruiken. Het dient nooit op een oncomfortabel niveau gebruikt te worden.

Zie de tabel "Tinnitus SoundSupport: gebruiksbeperkingen" in het hoofdstuk "Uw individuele hoortoestelinstellingen" achter in dit boekje om te weten hoeveel uur per dag u het verlichtende geluid op uw hoortoestellen veilig kunt gebruiken.

Belangrijke informatie voor hoorzorg professionals over Tinnitus SoundSupport

Omschrijving van het apparaat

Tinnitus SoundSupport is een functiemodule die door een hoorzorg professional in de hoortoestellen geactiveerd kan worden.

Maximale draagtijd

De draagtijd van Tinnitus SoundSupport wordt minder als het niveau boven de 80 dB(A) SPL komt. De aanpassoftware toont automatisch een waarschuwing als het hoortoestel boven de 80 dB(A) SPL komt. Zie de indicatie van de maximale draagtijd naast de tinnitusaanpasgrafiek in de aanpassoftware.

De volumeregeling is gedeactiveerd

De volumeregeling van de geluidsgenerator is standaard gedeactiveerd op het hoortoestel. Het risico op blootstelling aan lawaai is groter als de volumeregeling is geactiveerd.

Als de volumeregeling is geactiveerd

Er kan een waarschuwing worden weergegeven als u de tinnitusvolumeregeling activeert in het scherm "Toetsen en indicaties". Dit gebeurt als het verlichtingsgeluid kan worden beluisterd op niveaus die gehoorschade kunnen veroorzaken. De tabel "Maximale draagtijd" in de aanpassoftware geeft het aantal uren aan dat de cliënt veilig gebruik kan maken van Tinnitus SoundSupport.

- Controleer de maximale draagtijd voor elk programma waarvoor Tinnitus SoundSupport is geactiveerd.
- Schrijf die waarden in de tabel: "Tinnitus SoundSupport: tijdsbeperkingen voor gebruik" achterin deze gebruiksaanwijzing.
- Geef uw cliënt overeenkomstige instructies.

Tinnitus SoundSupport waarschuwingen

Als uw hoorzorg professional de Tinnitus SoundSupport geluidsgenerator heeft geactiveerd, let dan op de volgende waarschuwingen.

Er is een aantal mogelijke problemen verbonden aan het gebruik van geluid dat door een tinnitus management apparaat wordt gegenereerd. Dit zijn onder andere het mogelijk verslechteren van tinnitus en/of een mogelijke verandering in gehoordrempels.

Als u een verandering in uw gehoor of tinnitus opmerkt of vaststelt, of enige duizeligheid, misselijkheid, hoofdpijn, hartkloppingen of eventuele huidirritatie bij het contactpunt met het apparaat, staak dan onmiddellijk het gebruik van het apparaat en raadpleeg een arts, hoorzorg professional of andere professional.

Zoals bij alle apparaten kan misbruik van de geluidsgenerator mogelijk schadelijke effecten tot gevolg hebben. U moet ervoor zorgen dat onbevoegd gebruik wordt voorkomen en dat het apparaat buiten bereik van kinderen en huisdieren wordt gehouden.

Maximale draagtijd

Volg altijd de maximale draagtijd per dag van de Tinnitus SoundSupport op die door uw hoorzorg professional is geadviseerd. Langer gebruik kan uw tinnitus of gehoorverlies verergeren.

Algemene waarschuwingen

In verband met uw persoonlijke veiligheid en om zeker te zijn van een correct gebruik, dient u uzelf geheel vertrouwd te maken met de volgende algemene waarschuwingen voordat u uw hoortoestel gaat gebruiken.

Let op: uw hoortoestellen herstellen het normale gehoor niet. Ze voorkomen of verbeteren gehoorverlies door een fysiologische aandoening ook niet. In de meeste gevallen zal onregelmatig gebruik van een hoortoestel niet het volledige profijt opleveren.

Raadpleeg uw hoorzorg professional indien u een onverwachte werking van uw hoortoestel of ongewenst voorval ervaart.

Dit hoortoestel heeft een niet-verwijderbare oplaadbare lithium-ion batterijcel. Laad het hoortoestel op en maak uzelf vertrouwd met de veiligheid en informatie over het gebruik van oplaadbare hoortoestellen.

Probeer niet om de batterij uit uw hoortoestel te halen. De batterij kan uitsluitend door uw hoorzorg professional worden vervangen.

Laad het hoortoestel uitsluitend op met een oplader van Oticon. Andere opladers kunnen het hoortoestel en de batterij beschadigen.

Waarschuw onmiddellijk een arts bij inslikken van een hoortoestel of batterij.

Gebruik van hoortoestellen

Een hoortoestel mag alleen gebruikt worden zoals is voorgeschreven en geadviseerd door de hoorzorg professional. Onoordeelkundig gebruik kan plotseling en blijvend gehoorverlies veroorzaken.

Laat anderen nooit uw hoortoestel dragen, omdat verkeerd gebruik kan leiden tot permanente gehoorschade.

Gevaar van stikken en het inslikken van kleine onderdelen

De hoortoestellen en kleine onderdelen daarvan dienen buiten bereik te worden gehouden van kinderen en eenieder die ze zou kunnen inslikken of zich op andere wijze letsel zou kunnen toebrengen.

Risico's en gevaar met dodelijke afloop wanneer lithium-ion batterijen worden ingeslikt of in het oor of de neus worden gestopt

Slik lithium-ion batterijen nooit in of stop ze nooit in het oor of de neus, omdat dit kan leiden tot ernstig letsel of overlijden na al 2 uur. Dit kan het gevolg zijn van chemische brandwonden die tot permanente schade aan de neus of het oor kunnen leiden of mogelijk tot perforatie van de inwendige organen. Roep onmiddellijk medische hulp in als een lithium-ion batterij wordt ingeslikt of in het oor of de neus wordt gestopt.

Algemene waarschuwingen

Oplaadbare accu

Probeer het hoortoestel nooit te openen; hierdoor kan de batterij beschadigen.

Probeer de batterij nooit te vervangen. Als de batterij vervangen dient te worden, laat dit dan door de leverancier van het apparaat doen. De garantie vervalt als er geprobeerd is om de batterijlade te openen.

De veiligheid van het opladen van batterijen met een USB-kabel wordt bepaald door de externe geluidsbron. Bij aansluiting op externe op apparatuur met netvoeding, moet deze apparatuur voldoen aan IEC-62368 (of IEC-60065, IEC-60950 tot 20 juni 2019) of gelijkwaardige veiligheidsvoorschriften.

Slechte werking

Let op: er is een mogelijkheid dat de werking van uw hoortoestel kan worden beëindigd zonder voorafgaande melding. Houd dit in gedachten wanneer u afhankelijk bent van waarschuwingsgeluiden (bijv. in het verkeer). De hoortoestellen kunnen stoppen met werken, bijvoorbeeld wanneer de batterijen leeg zijn of de slangetjes verstopt zijn door vocht of oorsmeer.

Actieve implantaten

Het hoortoestel is grondig getest en goed bevonden voor de menselijke gezondheid volgens de internationale normen voor menselijke blootstelling (Specific Absorption Ratio; specifieke energieabsorptietempo [SAR]), opgewekt elektromagnetisch vermogen en spanningen in het menselijk lichaam.

De blootstellingswaarden liggen onder de internationaal aanvaardbare veiligheidsgrenzen voor SAR, opgewekt elektromagnetisch vermogen en spanningen in het menselijk lichaam die zijn gedefinieerd in de normen voor menselijke gezondheid en de coëxistentie met actieve medische implantaten, zoals pacemakers en defibrillators.

Als u een actief hersenimplantaat heeft, neem dan contact op met de fabrikant van het implantaat voor informatie over het risico op verstoring.

De MultiTool (die een ingebouwde magneet heeft), dient minstens 30 cm van het implantaat verwijderd te blijven, draag het bijvoorbeeld niet in uw borstzak.

Röntgenstraling, CT-, MRI-, PET-scans en elektrotherapie

Verwijder uw hoortoestel vóór het maken van een röntgenfoto, bij CT-, MRI-, en PET-scans, elektrotherapie of een operatie. Het hoortoestel kan beschadigen bij blootstelling aan sterke magnetische velden.

Algemene waarschuwingen

Hitte en chemicaliën

Stel uw hoortoestel nooit bloot aan extreme hitte, bijvoorbeeld door het te laten liggen in een in de zon geparkeerde auto.

Het hoortoestel mag niet worden gedroogd in een magnetron of oven.

Chemicaliën in cosmetica, haarlak, parfum, aftershave lotion, zonnebrandcrème en insectenspray, kunnen uw hoortoestel beschadigen. Verwijder daarom altijd uw hoortoestel voordat u dergelijke producten aanbrengt en neem de tijd om het te laten drogen, voordat u uw hoortoestel weer plaatst.

Power toestel

Bij het kiezen, passen en gebruiken van een hoortoestel met een maximale geluidsdruk van meer dan 132 dB SPL (IEC 711) is bijzondere aandacht vereist, omdat er een risico bestaat van aantasting van het resterende gehoor van de gebruiker van het hoortoestel.

Raadpleeg het modellenoverzicht om te zien of uw hoortoestel een power toestel is.

Mogelijke bijwerkingen

Hoortoestellen en oorstukjes kunnen voor een versnelde opbouw van oorsmeer zorgen.

Raadpleeg de achterzijde van dit boekje om te zien of uw hoortoestel een power toestel is.

Raadpleeg een arts als één van deze bijwerkingen optreedt.

Storing

Uw toestel is grondig getest op storing, volgens de strengste internationale normen. Er kan echter onvoorziene storing optreden tussen het hoortoestel en andere apparaten (bijvoorbeeld sommige mobiele telefoons, zendapparatuur, alarmsystemen in winkels en andere apparaten). Probeer in dat geval de afstand tussen het hoortoestel en de storende apparatuur te vergroten.

Gebruik in vliegtuigen

Uw hoortoestel is voorzien van Bluetooth. Aan boord van een vliegtuig dient de vliegtuigmodus te zijn ingeschakeld, tenzij speciale toestemming voor Bluetooth door het cabinepersoneel wordt gegeven.

Aansluiting op externe apparatuur

De veiligheid van het hoortoestel bij aansluiting op externe apparatuur (via een externe ingangskabel, via een USB-kabel of rechtstreeks) is afhankelijk van de externe apparatuur. Bij aansluiting op externe apparatuur met netvoeding, moet deze apparatuur voldoen aan IEC-62368 (of IEC-60065, IEC-60950 tot 20 juni 2019) of gelijkwaardige veiligheidsvoorschriften.

Problemen oplossen

Problemen oplossen voor de oplader, zie Gebruiksaanwijzing voor de oplader

Klacht	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Geen geluid	De batterij van het hoortoestel is leeg	Laad het hoortoestel op
	Lege batterij	Neem contact op met uw hoorzorg professional
	Verstopte oorstukjes (dome, GripTip of mould)	Reinig het oorstukje Vervang de oorsmeerfilter, dome of GripTip
Onderbroken of verminderd geluid	Verstopte geluidsopening	Maak het oorstukje schoon of vervang de oorsmeerfilter, dome of GripTip
	Vocht	Veeg het hoortoestel voorzichtig af en laat het drogen
	De batterij van het hoortoestel is leeg	Laad het hoortoestel op
Snerpend geluid	Het oorstukje van het hoortoestel is niet goed in het oor geplaatst	Plaats het oorstukje opnieuw
	Ophoping van oorsmeer in de gehoorgang	Laat de gehoorgang onderzoeken door uw arts
Piepen	Als uw hoortoestel 8 piepjes geeft, 4 keer achtereenvolgend, dan heeft de microfoon van uw hoortoestel een onderhoudscontrole nodig	Neem contact op met uw hoorzorg professional

Als bovenstaande oplossingen niet werken, raadpleeg dan uw hoorzorg professional.

Zie volgende pagina

Problemen oplossen

Zie de Gebruiksaanwijzing voor de oplader voor problemen met de oplader

Klacht	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De LED van het hoortoestel blijft uit wanneer het in de oplader wordt geplaatst	De oplader is niet ingeschakeld	Controleer of de stroom van de oplader juist is aangesloten
	Het hoortoestel of de oplader is te warm of te koud	Verplaats de oplader en het hoortoestel naar een plaats met een temperatuur tussen +5 en +40 °C
	Opladen is onvolledig. De kamertemperatuur is hoger dan +35 °C, wat de oplaadtijd verhoogt. De oplader is gestopt met opladen om de batterij te beschermen	Plaats het hoortoestel terug in de oplader. Hierdoor wordt het opladen voltooid binnen ongeveer 15 minuten
	Het hoortoestel is niet juist in de oplader geplaatst	Controleer de oplaadpoorten op vreemde voorwerpen
De LED van het hoortoestel knippert rood wanneer het toestel in de oplader wordt geplaatst	Systeemfout	Neem contact op met uw hoorzorg professional
Koppelingsproblemen met Apple apparaat	Bluetoothverbinding mislukt	<ol style="list-style-type: none">1) Ontkoppel uw hoortoestel (Instellingen → Algemeen → Toegankelijkheid → Gehoorapparaten → Apparaten → Vergeet dit apparaat).2) Schakel Bluetooth uit en weer in.3) Zet het hoortoestel uit en weer aan.4) Koppel het hoortoestel opnieuw (zie paragraaf: "Koppelen met iPhone").
	Slechts één hoortoestel is gekoppeld	

Als bovenstaande oplossingen niet werken, raadpleeg dan uw hoorzorg professional.

Water- en stofbestendig (IP68)

Uw hoortoestel is water- en stofbestendig, wat betekent dat het ontworpen is om in alle dagelijkse situaties gedragen te worden. U hoeft zich dus geen zorgen te maken over zweet of regen.

Eventueel vocht op het hoortoestel dient vóór het opladen te worden afgeveegd.

Mocht uw hoortoestel toch in contact komen met water en niet meer werken, veeg het water er voorzichtig af en laat het toestel drogen.

BELANGRIJKE OPMERKING

Draag uw hoortoestel niet tijdens het douchen of tijdens activiteiten in het water. Dompel uw hoortoestel niet onder in water of andere vloeistoffen.

Hoortoestel: Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksomstandigheden	Temperatuur: +5°C tot +40°C Relatieve luchtvochtigheid: 5% tot 93%, niet-condenserend
Oplaadomstandigheden	Temperatuur: +5°C tot +40°C Relatieve luchtvochtigheid: 5% tot 93%, niet-condenserend
Opslag- en transportomstandigheden	De temperatuur en luchtvochtigheid mogen niet voor een langere periode boven de volgende limieten uitkomen: Transport: Temperatuur: -20°C tot +60°C Relatieve luchtvochtigheid: 5% tot 93%, niet-condenserend Opslag: Temperatuur: -20°C tot +30°C Relatieve luchtvochtigheid: 5% tot 93%, niet-condenserend

Garantie- certificaat

Naam van eigenaar: _____

Hoorzorg professional: _____

Adres hoorzorg professional: _____

Telefoon hoorzorg professional: _____

Aankoopdatum: _____

Garantieperiode: _____ Maand: _____

Model links: _____ Serienr.: _____

Model rechts: _____ Serienr.: _____

Internationale garantie

Uw hoortoestel valt onder een internationale beperkte garantie die door de fabrikant is afgegeven voor de eerste twaalf maanden. Deze beperkte garantie dekt fabricage- en materiaalfouten in het hoortoestel zelf, maar niet in accessoires zoals batterijen, slangen, luidsprekers, oorstukjes en filters, enz. Problemen als gevolg van onjuist gebruik of onderhoud, overmatig gebruik, ongelukken, reparaties uitgevoerd door onbevoegden, blootstelling aan corrosie veroorzakende omstandigheden, fysieke veranderingen aan uw oor, schade door vreemde objecten in het toestel of onjuiste aanpassingen vallen NIET onder de beperkte garantie en kunnen deze

laten vervallen. De bovenstaande garantie heeft geen invloed op uw eventuele wettelijke rechten volgens de van toepassing zijnde nationale wetgeving betreffende de verkoop van consumentengoederen. Uw hoorzorg professional heeft mogelijk een garantie afgegeven die verder strekt dan de bepalingen van deze beperkte garantie. Raadpleeg uw hoorzorg professional voor meer informatie.

Als u ondersteuning nodig heeft
Bij problemen met uw hoortoestel kunt u het beste naar uw hoorzorg professional gaan. Kleine reparaties of aanpassingen kunnen daar vaak ter plekke worden verricht.

Technische informatie

Het hoortoestel bevat twee radiotechnologieën, die hieronder worden beschreven:

Het hoortoestel bevat een radiozender die gebruikmaakt van kortbereik magnetische inductietechnologie op 3,84 MHz. De magnetische veldsterkte van de zender is zeer zwak en is altijd lager dan -40 dB μ A/m op een afstand van 10 meter.

Het hoortoestel bevat ook een radiozendontvanger Bluetooth Low Energy (BLE) en een propriëtaire radiotechnologie met kort bereik die beide op 2,4 GHz werken. De 2,4 GHz radiozender is zwak en is altijd lager dan 4 dBm EIRP totaal uitgestraald

vermogen.

Het hoortoestel voldoet aan de internationale normen betreffende elektromagnetische compatibiliteit en menselijke blootstelling.

In verband met de beperkte ruimte op het hoortoestel zijn alle relevante goedkeuringen opgenomen in dit boekje.

Meer informatie is te vinden in de "Technische data" op www.oticon.nl

VS en Canada

Het hoortoestel bevat een radio-module met de volgende certificerings-ID-nummers:

FCC ID: U28AUMRTRC
IC: 1350B-AUMRTRC

Het apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels en de RSS-normen voor licentievrijstelling van de Canadese Industrie.

Gebruik is toegestaan onder de volgende twee voorwaarden:

1. dit toestel mag geen schadelijke storing veroorzaken.
2. dit toestel moet alle ontvangen storing accepteren, waaronder storing die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Veranderingen of modificaties die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen het recht doen vervallen om dit toestel te gebruiken.

Dit klasse B digitale apparaat voldoet aan de Canadese ICES-003.

Opmerking: Uit tests is gebleken dat dit apparaat voldoet aan de grenzen voor een digitaal apparaat Klasse B, conform deel 15 van het FCC reglement. Deze grenzen zijn bedoeld om bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie. Ook kan het radiofrequente energie uitstralen. Indien het apparaat niet geïnstalleerd en gebruikt wordt volgens de instructies, kan het schadelijke storing veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie. Als het apparaat schadelijke storing

veroorzaakt bij radio- of tv-ontvangst, hetgeen kan worden gecontroleerd door het aan en uit te zetten, wordt de gebruiker geadviseerd de storing te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen te treffen:

- Stel de ontvangende antenne opnieuw in of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een ander stroomcircuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Vraag de fabrikant of een ervaren radio/TV technicus om hulp.

De fabrikant verklaart hierbij dat dit hoortoestel voldoet aan de essentiële eisen en bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU.

Een conformiteitsverklaring is verkrijgbaar bij de fabrikant.



Vervaardigd door:
Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denemarken
www.oticon.global

CE 0543



Afval van elektronische apparatuur dient te worden weggegooid volgens de lokale voorschriften.

 **Bluetooth®**



IP68

Beschrijving van in dit boekje gebruikte symbolen



Waarschuwingen

Tekst aangeduid met een waarschuwingssymbool moet worden gelezen voordat het apparaat wordt gebruikt.



Fabrikant

Het apparaat is geproduceerd door de fabrikant wiens naam en adres naast het symbool worden vermeld. Geeft de fabrikant van het medische apparaat aan, zoals gedefinieerd in EU-Richtlijnen 90/385/EEG, 93/42/EEG en 98/79/EG.



CE-markering

Het apparaat voldoet aan Richtlijn 93/42/EEG inzake medische hulpmiddelen. Het viercijferige nummer geeft de aangemelde instantie aan.



Elektronisch afval (AEEA)

Recycle hoortoestellen, accessoires en batterijen volgens de lokale regelgeving. Hoortoestelgebruikers kunnen elektronisch afval ook inleveren bij hun hoorzorg professional voor verwijdering. Elektronische apparatuur die onder Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).



Regulatory Compliance Mark (RCM)

Het apparaat voldoet aan de vereisten betreffende elektrische veiligheid, elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrum voor apparaten bestemd voor de Australische of Nieuw-Zeelandse markt.

IP68

IP code

Duidt de classificatie aan voor bescherming tegen de binnendringing van water en stofdeeltjes volgens EN 60529:1991/A1:2002. IP6X duidt de totale bescherming tegen stof aan. IPX8 duidt de bescherming aan tegen de effecten van voortdurende onderdompeling in water.



Bluetooth

Bluetooth logo


Geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. waar elk gebruik van dergelijke merken een licentie vereist.



TwinLink
NFMI + 2,4 GHz

TwinLink

Het toestel bevat twee radiotechnologieën, Near-Field Magnetic Induction (NFMI); communicatie tussen twee hoortoestellen, en Bluetooth Low Energy (BLE) 2,4 GHz; voor de ondersteuning van communicatie met externe elektronische en digitale apparaten.

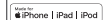

Made for Apple badges

Duidt aan dat het apparaat compatibel is met iPhone, iPad en iPod touch.

Beschrijving van gebruikte symbolen op het reglementaire verpakkingsetiket



Droog houden

Duidt een medisch apparaat aan dat moet worden beschermd tegen vocht.



Waarschuwingssymbool

Zie de gebruiksinstructies voor waarschuwingen.



Catalogusnummer

Duidt het catalogusnummer van de fabrikant aan, zodat het medische apparaat kan worden geïdentificeerd.



Serienummer

Duidt het serienummer van de fabrikant aan, zodat een specifiek medisch apparaat kan worden geïdentificeerd.

Uw individuele hoortoestelinstellingen

In te vullen door uw hoorzorg professional.

Tinnitus SoundSupport: Gebruiksbeperkingen

<input type="checkbox"/>	Geen gebruiksbeperkingen		
	Programma	Opstartvolume (Tinnitus)	Max volume (Tinnitus)
<input type="checkbox"/>	1	Max _____ uren per dag	Max _____ uren per dag
<input type="checkbox"/>	2	Max _____ uren per dag	Max _____ uren per dag
<input type="checkbox"/>	3	Max _____ uren per dag	Max _____ uren per dag
<input type="checkbox"/>	4	Max _____ uren per dag	Max _____ uren per dag

Overzicht toestelinstellingen				
Links			Rechts	
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	Volumeregelaar	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	Programmaschakelaar	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	Tinnitus SoundSupport	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
Indicators volumeregelaar				
<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit	Piept bij min/max volume	<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit
<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit	Piept bij verandering volume	<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit
<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit	Piept bij gewenst volume	<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit
Indicators batterij				
<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit	Waarschuwing lage batterijspanning	<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit

198009NL / 2019.01.14

198009NL / 2019.01.14



oticon
PEOPLE FIRST