

Signia: HandsFree Modus en CallControl

Bij HandsFree Modus worden de microfoons van de hoortoestellen gebruikt om de stem van de gebruiker op te vangen om handsfree telefoneren mogelijk te maken.

Voordelen

De telefoon aan het oor houden brengt verschillende uitdagingen met zich mee:

- Het kan vervelend zijn
- Er is kans op afleidingen
- Er is risico op gevaar
- Soms is het illegaal

Met HandsFree Modus en CallControl bij Signia, kan de klant telefoongesprekken opnemen via de hoortoestellen en de gesprekken voeren zonder de telefoon effectief vast te moeten houden.



Benodigheden

- Connexx software
 - Signia AX of Signia IX hoortoestellen
 - iPhone 11 of hoger met iOS versie 15.2 of hoger
- > Om de compatibiliteit te controleren, kan je de QR-code scannen met de smartphone en de mogelijkheden in kaart brengen:

Scan deze QR-code om te controleren of uw mobiele toestel compatibel is.



Resultaat compatibiliteitscontrole:

Uw apparaat: iPhone 14*, iPhone 13 Pro*, iPhone 13*, iPhone 12 Pro*, iPhone 12* met iOS 17.0.3.

- ✓ **Hands-free**
Apparaten gemarkeerd met * zijn compatibel.
- ✓ **Signia app**
Uw apparaat is compatibel.

Activeren


HandsFree bellen is automatisch geactiveerd na het uitvoeren van een FirstFit. De optie is zichtbaar in de Connexx Software bij het tabblad "Configuratie" -> "Regelaars en e2e Wireless". Zo kan je meteen ook controleren of de functie al dan niet wordt ondersteund.

The screenshot displays the Connexx software interface for configuring hearing aids. The 'Configuratie' tab is selected, and the 'Regelaars en e2e Wireless' section is highlighted. Within this section, the 'Call Control voor handsfree' option is checked and labeled 'HandsFree (iOS) wordt ondersteund'. Below this, the 'Bedieningsregelaars' (Control Settings) section is visible, including 'Activeer tuimelschakelaar' (Activate tilt switch) and 'Activeer inschakelvertraging' (Activate activation delay). The 'Volumeregelaar' (Volume Control) section shows a range of 16 dB and a 'Stand VC' (Stand Volume Control) setting. The 'Tinnitus Geluidstherapie' (Tinnitus Sound Therapy) section shows a range of 16 dB and a 'Huidige positie' (Current position) setting. The 'SoundBalance' section shows a range of 16 dB and a 'Stand' (Stand) setting. The 'Wireless adres' (Wireless address) section shows a range of 16 dB and a 'Wireless adres' (Wireless address) setting.


Deactiveren

Wil je HandsFree bellen graag deactiveren? Dat kan rechtstreeks in het iOS menu van de iPhone.

1) Configureer het bedieningspaneel bij instellingen:

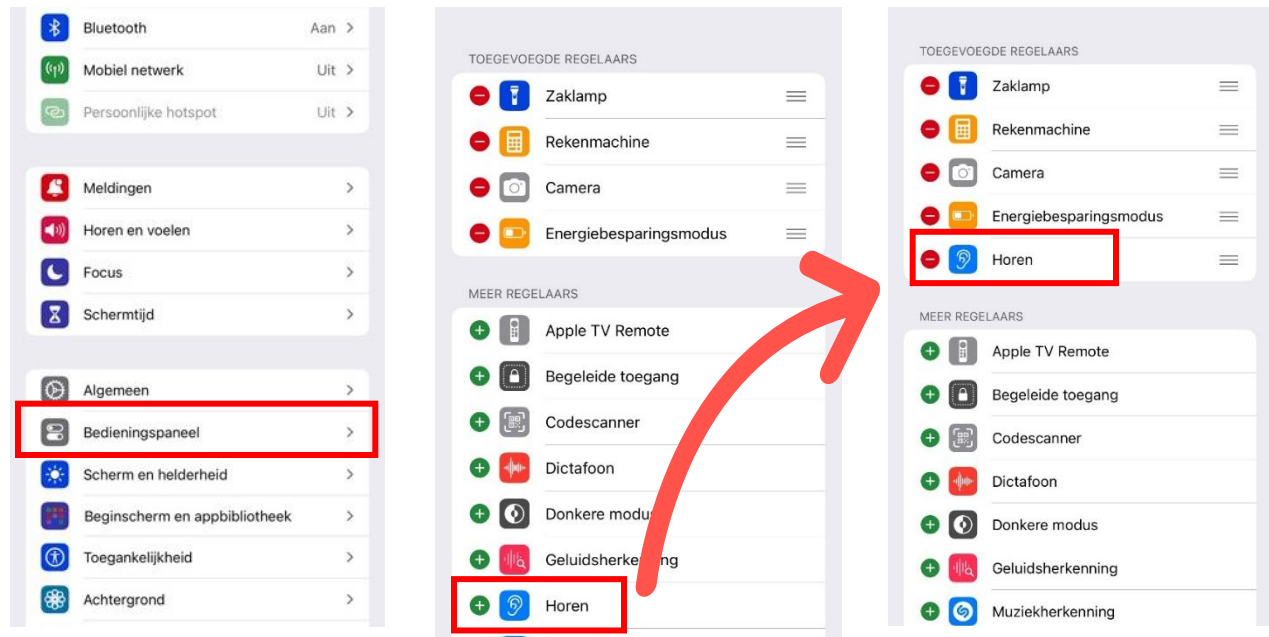

2) Toegang tot optie HandsFree bellen:

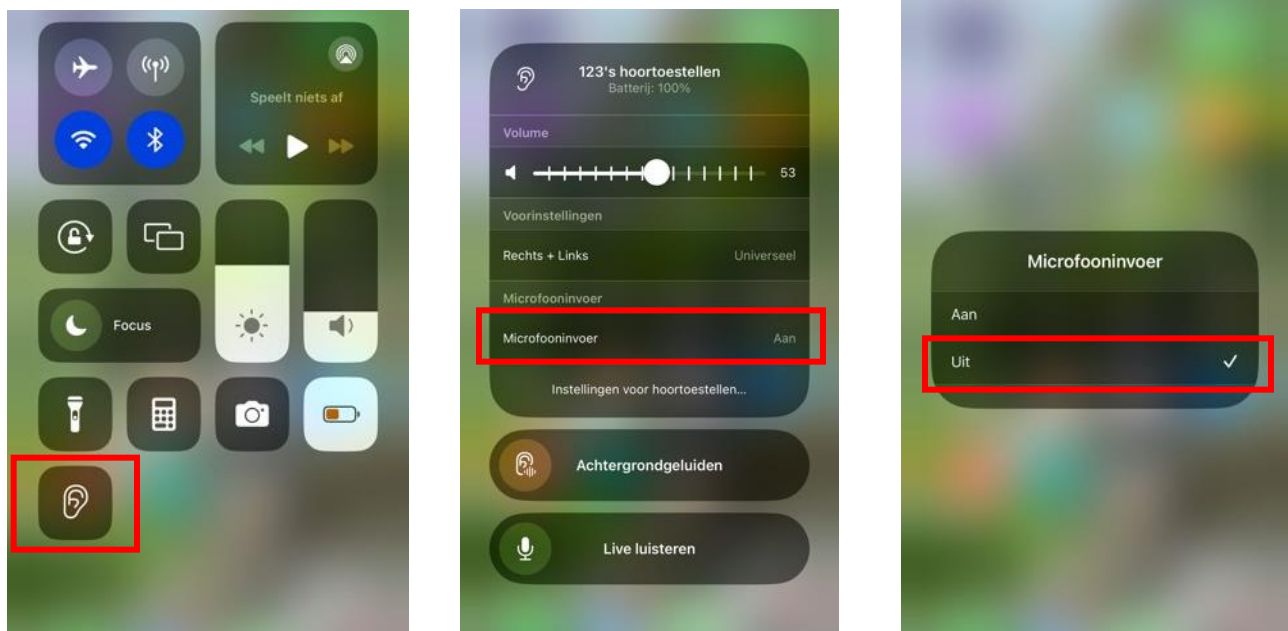

CallControl

Met CallControl kan de gebruiker telefoongesprekken opnemen via de hoortoestellen. Dit heeft als voordeel dat ze de Smartphone niet vast moeten houden.

Met Pure C&G hoortoestellen:



Met Styletto hoortoestellen:



In de Signia App, kun je het bevestigingssignaal in- en uitschakelen onder "Instellingen -> Hoortoestel instellingen -> Call control".